





ベッドセンサーについての豆知識

Q ベッドセンサーは寝返りで報知しますか？

A ベッドセンサーは寝返りでは報知しません。

ベッドセンサー上のどこかに荷重がかかれば、報知しない仕組みです。

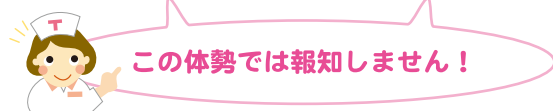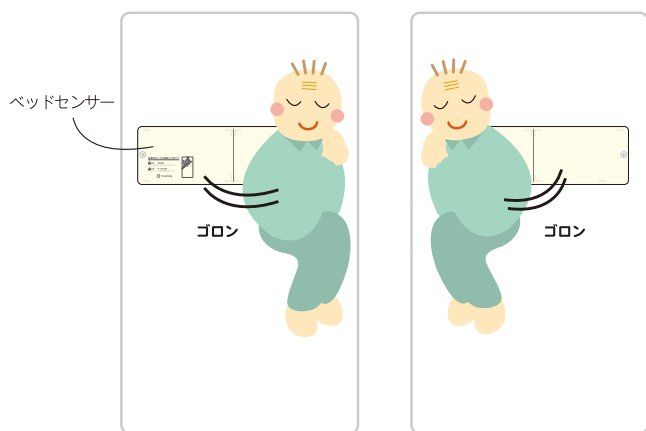

寝返りで報知してしまう？ ベッドセンサーのかんたんチェック




✔️ **ベッドセンサーの位置がずれていませんか？**

頻繁にずれる場合、ハトメ穴を利用し紐でマットレスに固定してください。




✔️ **ベッドセンサーが故障していませんか？**

ベッドセンサーの右半分、左半分をそれぞれ動作チェック

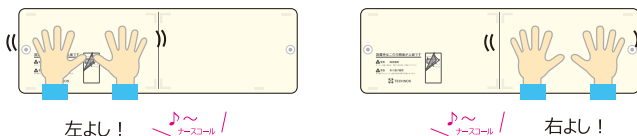

Q ベッドセンサーは折りたためますか？

A 折り曲げ線で、「谷折り」に折りたためます。但し、ベッドセンサーの保管時に限ります。
※使用時は必ず広げてお使いください。

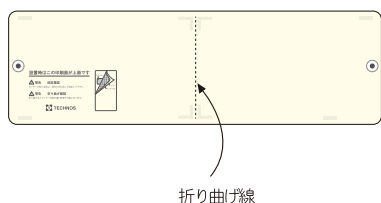

表面が中向きになるように「谷折り」に折りたたみください。



表面が外向きになると間違いです。