



# 新機能「ペアリング」で混信のお悩みを解決！



**Q** 新しく発売された離床センサーに「ペアリング」という機能が付いたようですが、どんな機能ですか？

**A** 新しく発売された『Cシリーズ』に、追加された新機能です。「ペアリング」を利用すれば、お互いの機種が干渉せず使うことができます！混信でお困りでしたら、ぜひおススメしたい機能です！



『Cシリーズ』を使用いただく場合、「ダイヤル」設定、または「ペアリング」設定を行います。


## ペアリング 送信器と受信器を「ペアリング」する方法です。



Aさん



ペアリング → ○

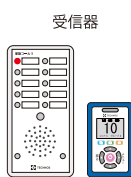

受信器



Bさん



ペアリングしていない → ×  
受信しない

Aさん → 受信する  
Bさん → 受信しない


ペアリングができているセンサーのみ受信します。左図は、Aさんがペアリングできているため、Aさんが受信でき、Bさんはペアリングができていないため、受信しません。

※ペアリングの方法は取扱説明書をご覧ください。

## ダイヤル 送信器と受信器の「エリア」「グループ」の数字を合わせる方法です。（従来と同じ）



Aさん

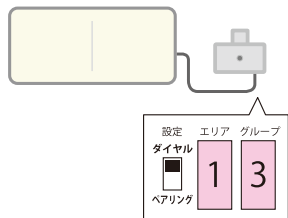


→ ○




受信器



Bさん

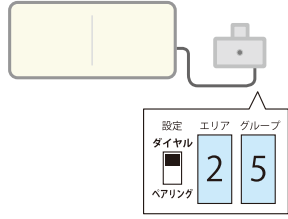


→ ×  
受信しない

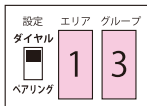

受信器



Cさん

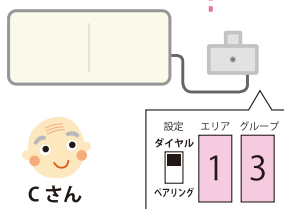

→ ○

Aさん → 受信する  
Bさん → 受信しない  
Cさん → 受信する

エリア・グループの同じ数字同士のセンサーを受信します。左図は、Bさんのみエリア・グループの番号が違うため、受信しません。