

離床センサー

vol.47 2013.4



現場レポート!



離床センサーをお使いの現場から、様々な工夫をご紹介します!



今回は、ベッドセンサーの固定方法をご紹介します。マットレスによってはセンサー裏面の滑り止めが効かず、正しい位置からセンサーがずれて正常に動作しません。また、センサーの故障にも繋がる恐れがあるのでセンサーの固定は重要です。ぜひ参考にしてください!

包帯で固定



包帯で固定。

伸縮性は抜群に優れており、備品を活用できます!



購入場所	備品活用、100円ショップ		
伸縮性	◎	ズレ防止	△

ソフトゴムテープで固定



手芸で使われるソフトゴムテープで固定。

100円ショップにも売られており、約5m100円と安価です。

ゴムなので伸縮性があり、設置もしやすいです。



購入場所	100円ショップ、手芸屋		
伸縮性	◎	ズレ防止	○

自転車用虫ゴムで固定



虫ゴム(約1m)で固定。

ゴム自体にも滑り止めの効果があり、今回紹介した3つの中ではズレ防止に一番効果がありました!



購入場所	100円ショップ、ホームセンター		
伸縮性	◎	ズレ防止	◎

ポイント

紐をマットに強く固定しすぎるとハトメ穴やマットが破損する恐れがありますので、伸縮性のあるタイプがおすすめです!

