




現場レポート!

離床センサーをお使いの現場から、様々な工夫をご紹介します!

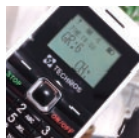

ポケット受信器の使用事例


携帯出来るのが特徴のポケット受信器。
今回は、ポケット受信器にありがちな故障を少しの気遣いで防げる工夫を紹介します!

充電器の差込間違いを無くすひと工夫!



➔ 充電器差込方向間違いで充電器故障や差込口の端子故障が急増しています。

N病院では、充電する際にすぐ分かるよう、充電器に「上」「下」と書かれたシールが貼られています。これなら、差し間違いによる故障は防げますね!!

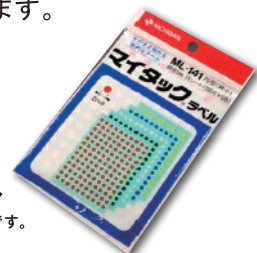

小さめのシール
上下どちらにも貼るのが良いです。

チャック付ポリ袋の活用で故障防止!

➔ ポケット受信器は、防水・防滴構造ではありませんので水濡れは厳禁です!しかし、水を使う場面は頻繁にありますよね。
入浴介助、手洗い、お茶を飲む、食事をする…
水濡れによる故障を防止するために、**チャック付ポリ袋**にポケット受信器を入れ、携帯されている施設があります。
水はねから守るには◎!のひと工夫!
是非、マネしてみてくださいね!

※この対策は水濡れを防ぐ簡易対策であり、完全防水の為の対策ではありません。



ポイント

充電差込口の損傷と水濡れによる基板の腐食はポケット受信器故障で多く報告されていますので、上記対策を取ることは大切です!

