

離床センサーのパイオニア・テクノスジャパンがお届けします

テクノス通信 *Nursing*

1月
vol.80
2016

今月のテーマ 「2015 秋の新製品ご紹介～ vol.3 ～」

2015 年秋に発表しました新製品を順に特集しています！

3 「^{りしつ}離室コール」

ナースコール

専用受信器

で報知

部屋から離れると
報知します。


対象者の手首または足首に「タグ」を取付け、
対象者（タグ）が無線中継ボックスから一定距離
“離れる”と報知します。



タグ



無線中継ボックス

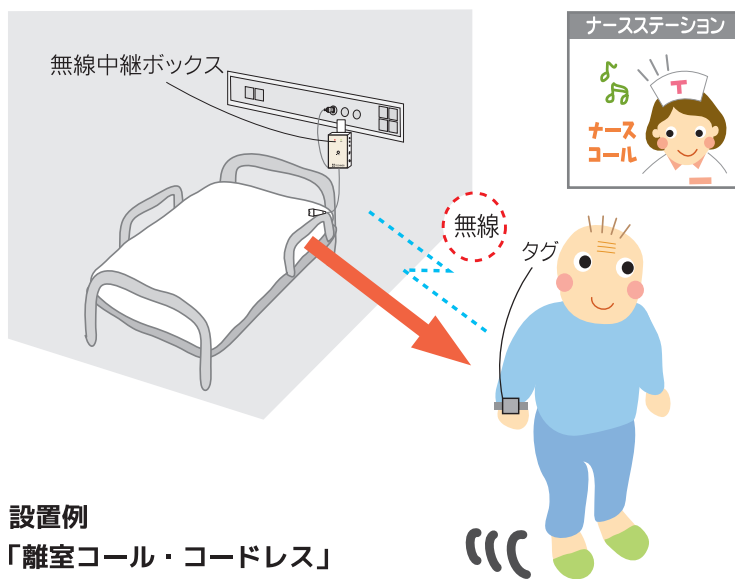

設置例
「離室コール・コードレス」

■報知方法は2つから選べます！

ナースコール

専用受信器

ポケット受信器、ハイパー受信器 10
スーパー受信器、メロディチャイム 10

■「離室コール」の特長

- ①「タグ」は専用治具でのみ取り外しが可能！
対象者自身でタグを取り外せません。
- ②「タグ」は生活防水対応です！




こちらもおススメ！ 離棟対策には『徘徊ナビ』

出入口に近づくと報知します！

「徘徊ナビ」は 2014 年に発売された離棟対策用の製品
です。「出入口」や「エレベーター」等に近づいた対象者を
検知し専用受信器でお知らせします！

■報知方法は **専用受信器** です。

ポケット受信器、ハイパー受信器 10
スーパー受信器、メロディチャイム 10

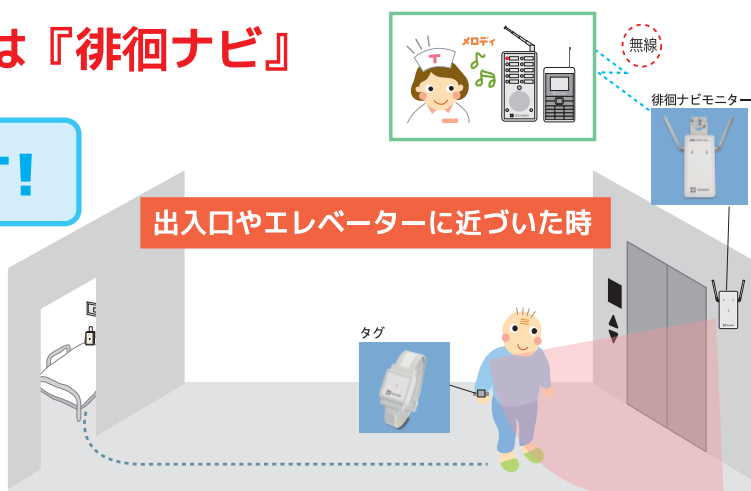

来月号もご期待ください。

無断の複製、転載は固くお断りいたします。 Copyright(C)2016 Technos Japan Co.,Ltd. All Rights Reserved.