




今月のテーマ

2016 秋の新製品「パネコール」のご紹介

## スイッチを押さずにナースコールができる 「パネコール」

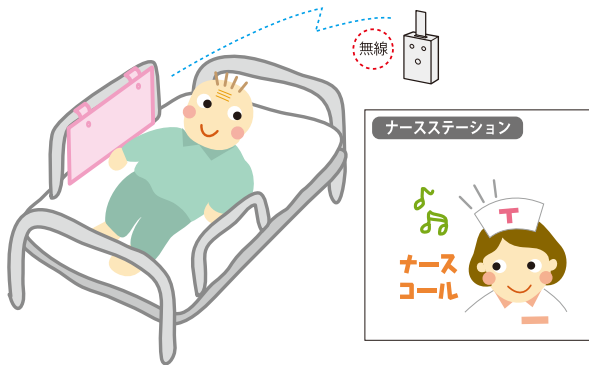

「パネコール」はスイッチを押したり、握れない人のためのナースコールスイッチです。手・腕・足をパネコールスイッチに触れるだけでナースコールができます。また設置も簡単です！



「パネルスイッチ」

設置もワンタッチで  
とってもかんたん！



### ナースコールの流れ

#### 一般的なナースコール

- ① スイッチを探す
- ↓
- ② スイッチを握る
- ↓
- ③ 指でスイッチを押す

**ナースコール**


#### パネコール

手・腕・足をパネコールスイッチに触れる。

**ナースコール**

#### 設置例 手指の硬縮が進行した患者さん


押しボタンタイプのナースコールを握って押すことが困難なBさん。  
パネコールは**手の甲を軽く当てるだけで**ナースコールができます。  
また、設置は**ベッド柵に引っ掛ける**のでスイッチが床に落ちる心配もありません！

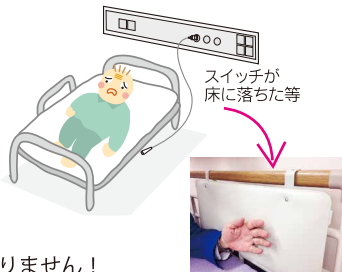

軽く触れるだけ！

#### 設置例 両手が骨折している患者さん

両手を骨折しているため、通常のスイッチが押せません。「パネコール」をベッド柵の足元近くに引っ掛ければ、**足でナースコール**ができます！

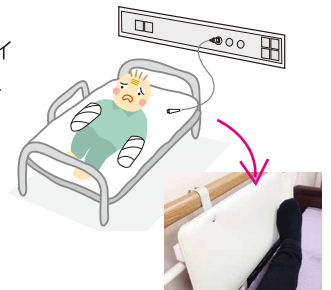

#### パネル全体がスイッチ

パネルスイッチは表面全体がスイッチになっており、軽く触れるだけでナースコールができます。



#### 設置がかんたん

パネルスイッチはフックが2つ付いています。サイドレールに引っ掛けるだけで簡単に設置ができます。



#### コードレス

コードレス仕様なので、ベッド廻りがケーブルで煩雑になることはありません。



スッキリ☆

#### ピピッと患者にお知らせ

スイッチが作動した時は、ピピッと反応音が出ますので、患者様は押したことがわかります。



ピピッ