

コールマット・徘徊コールⅢ

T 説 H07-1

型式 HC-3

取扱説明書

弊社の製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
説明書は、必要な時にいつでも見られるよう、大切に保管して下さい。



目次

はじめに

使用上のご注意	1
免責	2
製品概要	3
製品内容と各部名称	3

使い方

標準設置方法	4
増設設置方法	5

お手入れ・その他

お手入れ方法	5
製品仕様	6
保証とアフターサービス	7

使用上のご注意 (必ずお守り下さい)

ご使用になる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容を記載しております。次の内容をよくご理解の上、記載事項をお守り下さい。

表示の説明



注意

取り扱いを誤った場合、人的または物的損害の恐れがある内容を示しています。

図記号の説明



禁止

してはいけないこと（禁止）を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の近くに文章で示します。



指示

指示する行為の強制（必ずすること）を示します。
具体的な指示内容は、図記号の近くに文章で示します。



注意

注意を示します。
具体的な注意内容は、図記号の近くに文章で示します。



注意



分解禁止

分解、改造はしないで下さい
故障、怪我の原因となります。
修理については7ページをご覧ください。



水気禁止

中継ボックスに水をかけないで下さい
中継ボックスは、防水・防滴構造ではありません。
内部に水が浸入すると、修理不可能となる恐れがあります。



水気禁止

マットスイッチは水に浸けないで下さい
マットスイッチは防滴加工ですが、防水・防雨構造ではありません。
センサー内部に水が浸入すると、修理不可能となる恐れがあります。



折り曲げ禁止

マットスイッチは強く折り曲げないで下さい
折り曲げるとセンサー部分が破損し、修理不可能となる恐れがあります。
*折り曲げ線では折りたたむことができます。



切傷禁止

マットスイッチには絶対に傷を付けないで下さい

切口から水などが入って絶縁不良を起こし、修理不可能となる恐れがあります。



高温禁止

マットスイッチは 40℃以上の物と接触させないで下さい

耐温度は約 40℃です。



置物禁止

マットスイッチの上には物を置かないで下さい

上に物が乗っているとセンサーが正しく動作しない可能性があります。



落下注意

中継ボックスの落下にご注意下さい

落下の衝撃で内部の電子部品が壊れ、修理不可能となる恐れがあります。

尚、上記の警告・注意事項を遵守しなかった場合での故障は、保証期間内であっても保証の対象外となりますのでご注意ください。

免責

- 本製品は離床報知器として使用するものであり、転倒・転落を直接的に防止するものではありません。あくまでも転倒・転落防止の補助手段として使用するものです。万一発生した人身事故、災害事故等による損害については、弊社は一切責任を負いません。
- 天災及び弊社の責任以外の火災・第三者による行為、その他の事故、お客様の故意又は過失、誤用、その他正常でない条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。


製品概要

「コールマット・徘徊コールⅢ」は、ベッド横等に設置したマットスイッチに荷重がかかった事を感じ、常設のナースコール設備を用いて報知する製品です。


製品内容と各部名称

標準セットは以下の内容です。万が一不足品がありましたら、販売店までご連絡下さい。


マットスイッチ (1 枚)

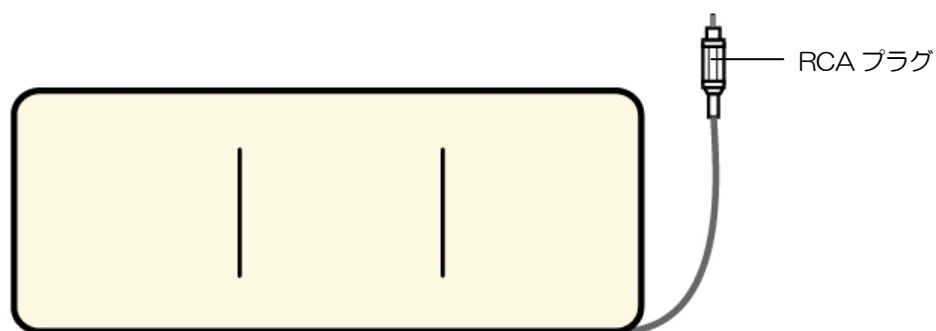

中継ボックス (1 台)

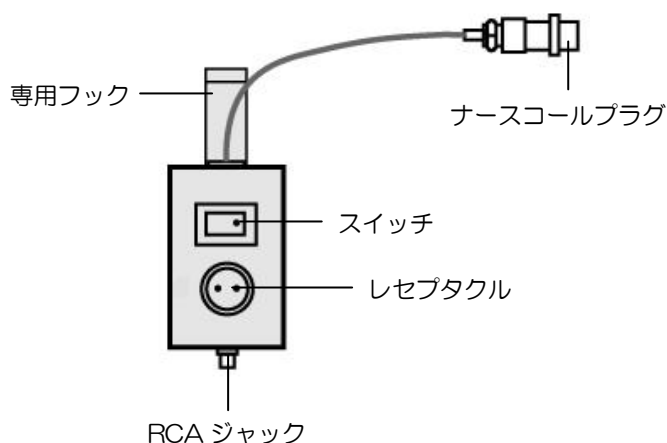

壁掛ベース (1 個)

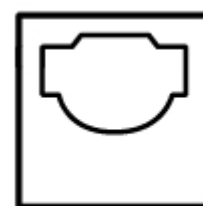


標準設置方法

マットスイッチの設置

- ① マットスイッチを「警告ラベル」貼付面を下面としてベッド横などの床面（凹凸が少なく砂や粉などが無い）に設置して下さい。
- ② 中継ボックスの専用フックを、ベッドのパイプ等に引っ掛けて下さい。

*専用フックで取付けが不可能な場合は、壁掛ベースを使ってナースコールパネルに取り付けてください。

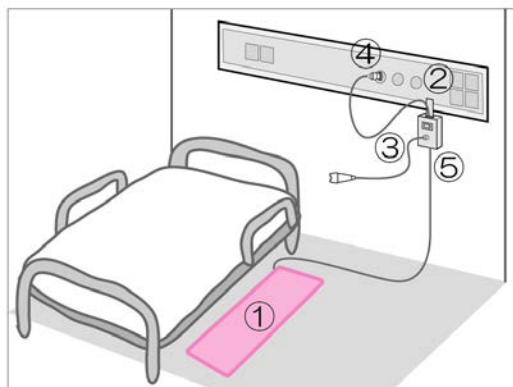


1. 幅広フックに引っ掛ける



2. 幅狭フックに引っ掛ける



3. コネクタに引っ掛ける

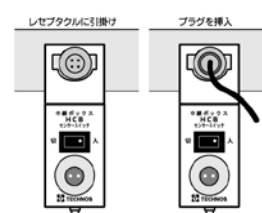

- ③ ナースコールスイッチを中継ボックスのレセプタクルに差し込んで下さい。
- ④ 中継ボックスのナースコールプラグを壁面のナースコール端子に差し込んで下さい。
- ⑤ マットスイッチのRCAプラグを中継ボックスのRCAジャックに差し込んで下さい。
- ⑥ 中継ボックスのスイッチを入れて下さい。

動作確認

実際に使用される状態で、マットスイッチを作動させ、ナースコールで正しく報知する事を確認してください。

増設設置方法

分岐ハーネスを使用することによって、マットスイッチを増設することができます。
増設用として「マットスイッチ+2(または3)分岐ハーネス」(別売)をご用意しています。
マットスイッチの設置、中継ボックスの取付けは、標準設置方法と同じです。

増設セットと中継ボックスの接続

- ① ナースコールスイッチを中継ボックスのレセプタクルに差し込んで下さい。
- ② 中継ボックスのナースコールプラグを壁面のナースコール端子に差し込んで下さい。
- ③ 分岐ハーネスのRCAプラグを中継ボックスのRCAジャックに差し込んで下さい。
- ④ マットスイッチのRACプラグを分岐ハーネスのRCAジャックに差し込んで下さい。
- ⑤ 中継ボックスのスイッチを入れて下さい。

*3分岐ハーネス使用の場合も接続手順は同じです。

お手入れ方法

マットスイッチ



水厳禁

濡れた雑巾または少し中性洗剤を付けた布で拭いて下さい。
防水構造ではありませんので、水に浸けたり水をかけることは絶対に避けて下さい。

中継ボックス



水厳禁

表面が汚れた場合はアルコールタオルなどで軽く拭き取って下さい。
防水・防滴構造ではありませんので、絶対に水拭きをしたり水をかけたりしないで下さい。

製品仕様

マットスイッチ

* マットスイッチはMS1200/800/900/1500の4種類があります。

型式	MS1200	材質	PVC
サイズ	1200×500×4mm	色	アイボリー
ケーブル長	約2.4m	防滴	IP61

型式	MS900	材質	PVC
サイズ	900×600×4mm	色	アイボリー
ケーブル長	約2.4m	防滴	IP61

型式	MS1500	材質	PVC
サイズ	1500×500×4mm	色	アイボリー
ケーブル長	約2.4m	防滴	IP61

型式	MS800	材質	PVC
サイズ	800×500×4mm	色	アイボリー
ケーブル長	約1.4m	防滴	IP61

中継ボックス

型式	HCB2	ケーブル長	約1.2m(専用プラグ付)
サイズ	50×75×30mm (突起部除く)	材質	ABS樹脂
重量	約100g	色	グレー

保証とアフターサービス

ご不明な点、修理に関するご相談

お問い合わせいただきました販売店、または下記にご連絡下さい。

株式会社テクノスジャパン

お客様相談室

フリーダイヤル 0120-230-580

(受付時間：祝日を除く月～金曜日 9:00～18:00)

〒670-0947 兵庫県姫路市北条1-266

TEL (079)-288-1600 FAX (079)-288-0969

URL <http://www.technosjapan.jp>

保証書（別添）

本製品には保証書を別途添付しております。保証期間はご購入日より1年間です。

「ご購入日・販売店名」などをご記入後、大切に保管して下さい。

修理依頼について

保証書の規定に従って、修理させていただきます。

【保証期間】ご購入日より1年

【保証範囲】保証期間中に弊社の責による故障が生じた場合は、弊社の責任において修理又は交換を行います。

但し、次の場合は保証の範囲外とさせていただきます。

- ① 使用状態が正常でない場合
- ② 不当な改造・修理による場合
- ③ 販売後の運搬、落下などによる場合
- ④ 天災、災害などによる場合

尚、ここで言う保証は製品のみ保証であり、製品の故障により誘発される損害についてはご容赦いただきます。