

かんたん設置マニュアル

家族コール2・Cタイプ

型式

HK-2C

※本書面は取扱説明書の補助資料です。
ご使用前は必ず取扱説明書をご覧ください。

- 赤外線が反応してお知らせ！
- 工事不要で簡単設置！


1. 標準構成



◀ハイパー・赤外線センサー K (IBS180HK3)



ACアダプタ


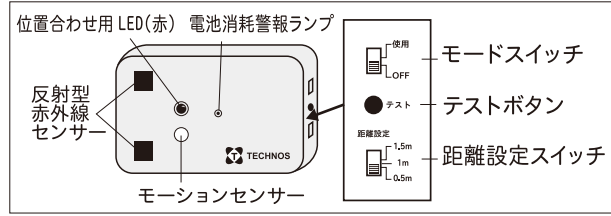


◀メロディチャイム10 (HRH800-100K)



ACアダプタ

2. 設置・接続と運用のポイント

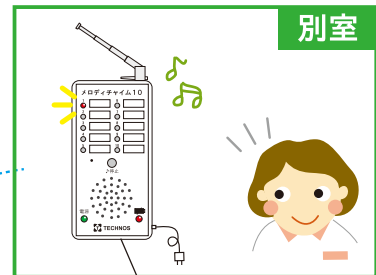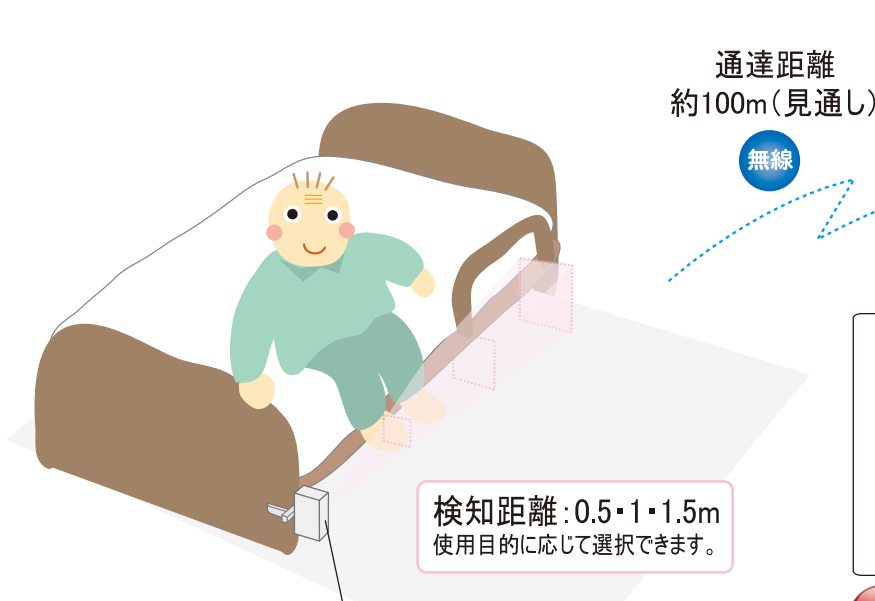


②メロディチャイム10の設置

ACアダプタをコンセントに差込み、電源を入れて下さい。


- ◆音量 大・中・小より選択
- ◆報知時間 10秒・30秒・連続より選択

①赤外線センサーの設置と設定

◆「テストモード」で位置と角度を確認して下さい。

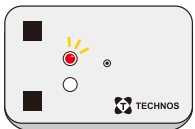


テストボタンを押すと約30秒間赤色ビームが点滅し照射範囲に入ると、「ピー」という音が鳴ります。

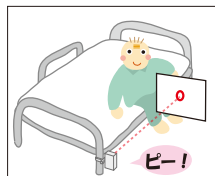

* 白い紙などに写ります。


◆ 検知時間を設定して下さい。

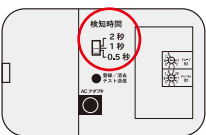

起き上がり: 2秒 立ち上がり: 0.5~1秒 通過: 0.5秒



赤外線センサーとメロディチャイム10は同グループで使用！

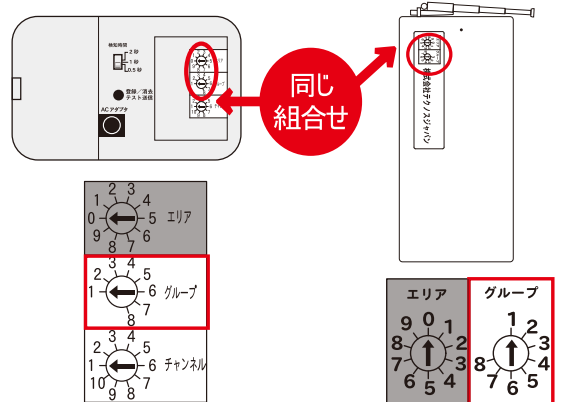


ハイパー赤外線センサー Kとメロディチャイム10のグループスイッチを同じ設定にすることで報知します。エアスイッチはグループ数(8グループ)の上限を超えて機器を使用する場合に使います。

3. 動作確認方法

- ①「使用モード」にし照射範囲に入るなどして、赤外線センサーを反応させて下さい。
- ②メロディチャイム10が鳴ることを確認して下さい。


メンテナンスと注意事項

清掃方法

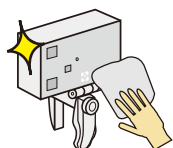

布（中性洗剤を含ませた布でも可）で清拭して下さい。
または、消毒用アルコールで清拭して下さい。


保管方法

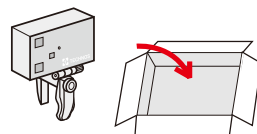

箱に入れ保管して下さい。
（納品時の箱は保管箱としてお使いいただけます。）
* 保管の際にセンサーの上に重い物を乗せないで下さい。


禁止 故障や誤動作の原因になりますので、禁止事項にご注意下さい。

**重い物
禁止**

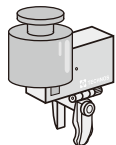


センサーの上に、重い物を乗せないで下さい。

**落下
禁止**

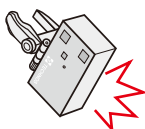


センサーを落下させないで下さい。

**衝撃
禁止**

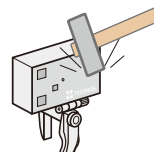

センサーを傷つけたり、衝撃を与えないでください。

**水浸け
禁止**

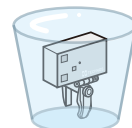

センサーは防水仕様ではありません。
濡れた場合は、速やかに拭き取って下さい。

故障かな？と思ったら



電池消耗警報ランプが点灯する…

赤外線センサーの電池が消耗すると、「電池消耗警報ランプ」が点灯お知らせします。
電池交換をして下さい。（006P 9V アルカリ電池）



テストモードではセンサーから「ピー」という音がするのに使用モードでは鳴らない…

テストモードでは位置合わせの際に分かりやすいよう、照射範囲に入ると「ピー」という音が鳴りますが、使用モードでは鳴りません。
また、位置合わせ用 LED ランプも同様にテストモード時のみ点灯します。* テスト時以外の点灯は電池交換のお知らせです。




センサーが鳴りすぎる…鳴るのが遅い…

センサーには 0.5/1/2 秒から選択できる検知時間設定があります。例えば 2 秒を選択した場合、照射範囲内に 2 秒以上検知すると報知し、動きの速い対象者では間に合わない事があります。対象者の状態に合わせ、適切な検知時間を設定して下さい。



センサーが鳴らない…別の部屋のセンサーが鳴る…

センサーとメロディチャイム10の「エリア」と「グループ」設定が一致していないと報知しません。
また、他のメロディチャイム10に報知するなど、混信の原因になります。センサーとメロディチャイム10の「エリア」「グループ」スイッチを同じ設定（組合せ）にして下さい。

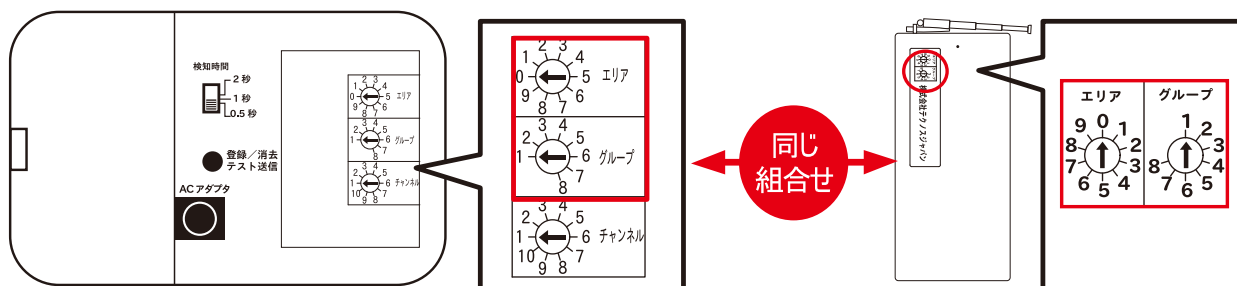

* エリアスイッチを使用しない場合はセンサー、メロディチャイム10とも“0”に合わせて下さい。（出荷時は“0”に設定）


* メロディチャイム10のグループ設定を変更した際は、電源を一度OFFにし、2～3秒経ってから再度ONして下さい。



メロディチャイム10の のランプが点灯する…

赤外線センサーの電池が消耗すると、受信した際に対応するチャンネルランプと  のランプが点灯します。

* 赤外線センサーの電池消耗以外は、チャンネルランプは点滅します。

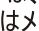受信時以外の  のランプ点灯はメロディチャイム10内部電池消耗のお知らせですので、すぐに AC アダプタに差込み、充電を行って下さい。充電には約 2 時間かかります * メロディチャイム10は基本的に AC アダプタにてご使用下さい。

