

かんたん設置マニュアル

家族コール 2D・ポケット

型式
HKP-2D


※本書面は取扱説明書の補助資料です。
ご使用前は必ず取扱説明書をご覧ください。

- ドアや扉を開くとお知らせ！
- 1人歩きが心配な方に！


1. 標準構成



2. 設置・接続と運用のポイント

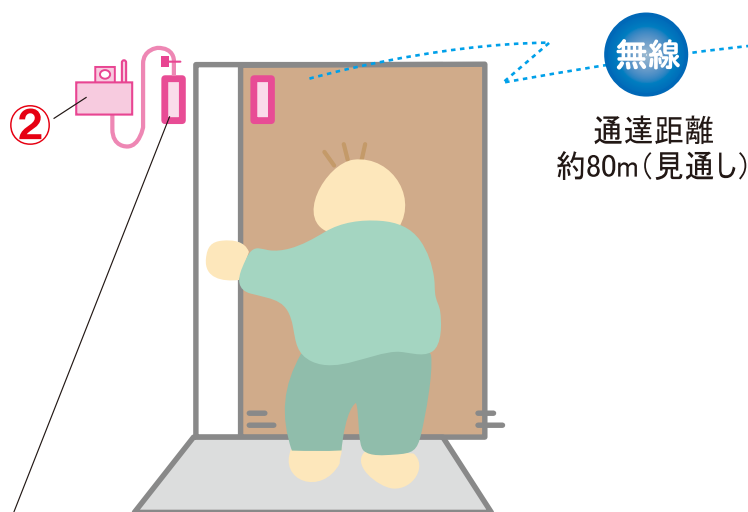

① ドアスイッチ K の設置

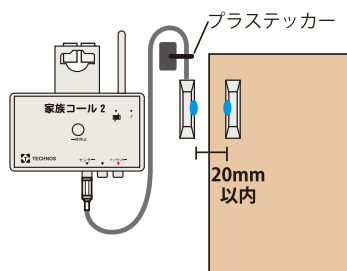

- ・青色シール部分が向かい合うように取り付けて下さい。
- ・ドアスイッチの間隔が 20mm 以内になるように取り付けて下さい。
- ・センサー部のケーブルの付け根は同梱のプラスチックで必ず固定して下さい。

② コンソール10の設置と接続

ステッカーで壁に取り付け、電源を入れて下さい。

◆ センサー接続ジャックに注意！



左もしくは中央に差し込んで下さい。

左・中央 = 荷重がかかった時に報知

右 = 荷重がなくなった時に報知

◆ 電源入忘れ防止！一時停止ボタン



5 分間作動停止後、自動復旧します。

* 作動停止中はランプが点滅。

* すぐ解除したい時は電源を一旦 OFF に。

◆ 電池切れに注意！



ランプが点灯してお知らせします。


006P 9V の電池で交換して下さい。

コンソール10とポケット受信器は同グループで使用！

コンソール10とポケット受信器のグループスイッチを同じ設定にすることで報知します。

エリアスイッチはグループ数（8グループ）の上限を超えて機器を使用する場合に使います。

* 詳細は裏面へ

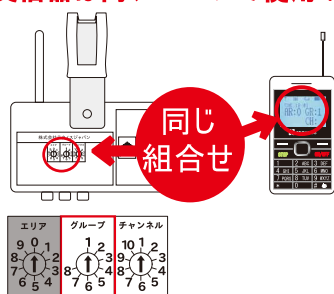

3. 動作確認方法

- ① ドアスイッチを設置したドアをあけて、センサーを反応させて下さい。
- ② ポケット受信器が鳴ることを確認して下さい。


メンテナンスと注意事項

清掃方法	保管方法
 <p>濡れた布（中性洗剤を含ませた布でも可）で清拭してください。 または、消毒用アルコールで清拭して下さい。</p>	 <p>所定の箱に入れ、保管して下さい。 （納品時の箱は保管箱としてお使い頂けます。） * 保管の際にセンサーの上に重い物を乗せないで下さい。</p>
<p>禁止 故障や誤動作の原因になりますので、禁止事項にご注意下さい。</p>	
<p>重い物 禁止</p>  <p>センサーの上に、重い物を乗せないで下さい。</p>	<p>高温 禁止</p>  <p>耐温は40度です。高温になる温熱器具を近づけないで下さい。</p>
<p>衝撃 禁止</p>  <p>センサーを傷つけたり、衝撃を与えないで下さい。</p>	<p>水浸け 禁止</p>  <p>センサーは防水仕様ではありません。水に浸けることは厳禁です。失禁や飲み物をこぼして濡れた場合は、速やかに拭き取って下さい。</p>

故障かな？と思ったら

✓ センサーが鳴るのが遅い…
センサー（ドアスイッチ K）はコンソール10の左もしくは中央のジャックに差しこんでいますか。右に差し込むとドアを閉めたタイミングで鳴りますので、離室を知らせるには、左もしくは中央のジャックに差し込んでご使用ください。

✓ センサーが鳴らない…別の部屋のセンサーが鳴る…
コンソール10とポケット受信器の「エリア」「グループ」設定が一致していないと報知しません。また、他の受信器に報知するなど、混信の原因になります。コンソール10とポケット受信器の「グループ」「エリア」スイッチは必ず同じ設定（組合せ）にして下さい。

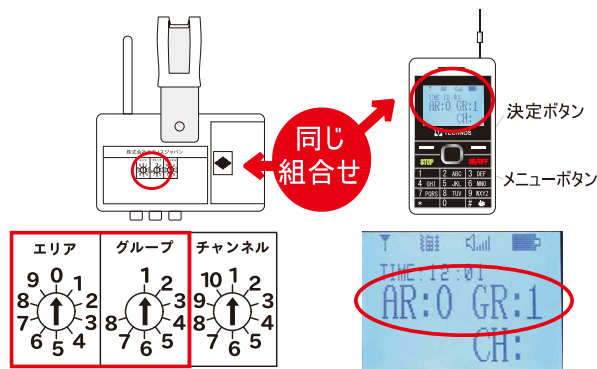

■ポケット受信器の「エリア・グループ」設定

1. メニューボタンを長押し
2. AR が点滅している時に、上下キーで選択し、決定ボタンで確定
* エリア設定を使用しない場合は送受信器とも「0」に合わせて下さい。（出荷時は「0」に設定）
3. GR が点滅している時に、上下キーで選択し、決定ボタンで確定
4. 確定後、ON/OFF ボタンで初期画面に戻る

✓ センサーが報知をしない…
受信器の液晶画面に受信履歴（CHの横に数字表示）が残っていませんか。履歴表示が残ったままだと、報知を受けた際に履歴は残りますがメロディが鳴りません。STOP ボタンを押し、履歴を全て消して下さい。

✓ センサーが報知をしない…コンソール10のランプが点滅している…
これはコンソール10の一時停止機能（5分間）によるものです。一時停止を解除するには電源スイッチを切り、入れ直して下さい。

✓ バイブレーションに設定したのにメロディが鳴る…
本受信器のバイブレーションは「マナーモード」ではありません。バイブのみで報知したい場合は、音量設定を「サイレント」にして下さい。