


## 今月のテーマ 【新製品紹介その④】「座コール・メロディタイプ」がリニューアル！

今月号では、車いすやイスからの立ち上がりを報知する離床センサーで「座コール・メロディタイプ」をご紹介します！

### 座コール・メロディタイプ<sup>®</sup>

車いすから立ち上がる動きを、フロア内のスタッフにお知らせします！

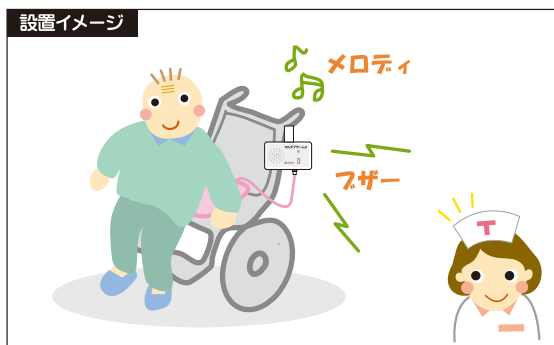

#### どんな対象者に有効？

- ・立ち上がり時、転倒の危険性が高い方
- ・認知障害や自立過信で車いすやイスから立ち上がる方
- ・車いすからずり落ちてしまう方

NEW

#### ここが新しくなりました！

#### 報知音の選択に大音量のブザーが加わりました！

「メロディ」に加え「ブザー」が報知音に加わりました。「ブザー」の特長は、大音量で遠くにおいても報知音が確認できます。広いフロアや、賑やかなリビングなどでも、90dBの大音量で車いすからの動きを見逃すことはありません！また報知音はリセットボタンを押すまで鳴り続けます。

※音の大きさについては今月号の「教えて相談室」で詳しく紹介しています。

### ●「座コール・メロディタイプ<sup>®</sup>」こんな活用事例があります！

#### 【課題】 ケース①

筋力がなくなり姿勢保持能力が低下。スタッフが少し目を離している間に、フットレストに転落してしまいました。

#### 【対策と効果】

車いすのクッションに滑り止めシートを敷くと同時に、座コールを設置。万一、車いすからずり落ちても報知することができます。




#### 【課題】 ケース②

転倒の危険度が高い車いすの利用者がフロア内を脚こぎで絶えず移動していますが、死角になっている場所へ行くとき動きが見えにくい。

#### 【対策と効果】

座コールを設置。目が届きにくい場所でも大音量のブザー音で立ち上がり行動を知ることが出来るので、フロア内のスタッフが気付きます。

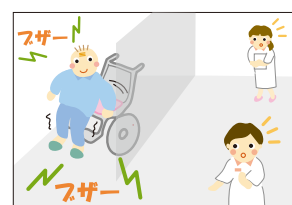

### 報知方法は 4 種



メロディ(その場で報知)

ナースコール

ポケット受信器ワイド

ハイパー受信器 10



### デモ機があります！

気になる患者さんや対策が不十分な場面はありませんか？ぜひ「座コール・メロディタイプ」をお試しください！

デモ機のお申込は、販売店様またはお客様相談室までフリーダイヤル 0120-230-580 (9-12,13-18時まで) お問い合わせください。