



今月のテーマ 離床センサーの清掃方法について

今月号では、離床センサーの清掃方法をご案内いたします。正しく清掃・消毒することでより安心してご使用いただけます。

準備するもの



中性洗剤
固くしぼった雑巾
ブラシ、ゴム手袋 など

●センサー (PVC 製)

マットスイッチ



中性洗剤を付け、ブラシで軽くこする
固くしぼった雑巾でふき取り、乾拭き

注意：防水仕様ではありませんので水洗いはしないでください。



ベッドセンサー



中性洗剤を付け、
固くしぼった雑巾でふき取り、乾拭き

注意：防水仕様ではありませんので水洗いはしないでください。



●中継ボックス、送信器、受信器 (ABS 樹脂製) など



中性洗剤をしみこませた雑巾で拭く



注意：アルコールタオルもご使用になれますが、強くこすると表面ラベルが剥がれることがあります。防水・防滴仕様ではありませんので、洗剤を直接吹き付けることや、水洗いはしないでください。

●センサーを消毒するには



使用するもの：次亜塩素酸ナトリウム(希釈度 0.05%)

- ①ウエス・ぞうきん等に浸透させて清拭してください。*1
- ②溶液が残らないようにしっかりと拭き取ってください。*2

注意：*1)溶液を直接浸けないでください。

*2)溶液が残っていると脱色や錆につながる可能性があります。