



今月のテーマ

【新製品紹介】新サイドセンサーが新発売！

昨年秋にサイドセンサーが新しく生まれ変わりました！サイドセンサーはマットレスの端に設置し、対象者が端座位になるとお知らせする離床センサーです。

旧サイドセンサーと比べると、サイズがコンパクトになり、それに伴い、設置方法が大きく変わりました。

旧サイドセンサーは、マットレスに巻きつけて設置しますが、新サイドセンサーはマットレスの上に置くだけで設置完了！その後は従来と同じように、上からシーツを被せて設置完了です。

この新しい設置方法ですと、マットレスの厚みを気にせずにサイドセンサーをご利用いただけます！

また、新センサーは裏面全体が滑り止め加工！シーツの下でもズレにくく、現場で気軽にお使いいただけるように改良しました。



NEW
11/15 発売

端座位になると
報知する「サイドコール」

サイドセンサーの設置例

従来センサー



マットレスに巻き付けて設置


設置が
かんたん
に！

新センサー



新センサーはマットレスに置くだけで設置完了！

サイドセンサーのサイズ比較

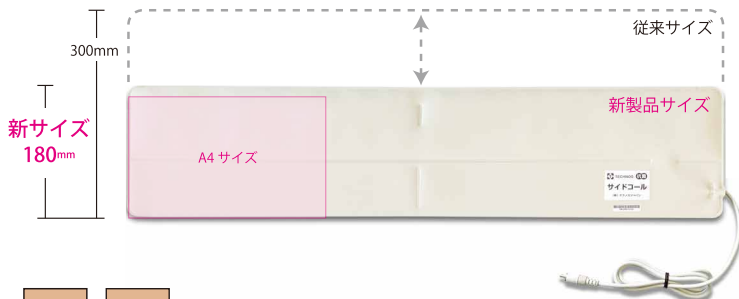

コンパクトサイズ！

裏面全面に滑り止め加工

NEW コードも白くなり
見た目もすっきり！



2005年に発売されたサイドセンサーが、今回新しくなり新発売です！コールマット、ベッドセンサーに続く人気のセンサーです！新しくなったサイドセンサーをぜひ医療現場、介護現場でぜひお役に立ていただければと思っています。



ここだけ押さえたらあしん運用！

サイドコール設置ポイント



センサー部が足や手などの荷重を検知しお知らせするしくみです。右図の様に、センサー部がマットレスの端（外側）の向きにるように設置します。

上から、シーツを被せ、対象者に見えないようにすれば設置完了です！

OK!

