

いつもキレイ・清潔にお使いいただくために！

# 離床センサー清掃について

アルコール清拭をしてください。



床敷きタイプのセンサーは、タワシでのこすり洗いが可能です。

洗剤、クレンザーで中性タイプの物でしたら使用可能です。

また、よごれがひどい場合はタワシでのこすり洗いも出来ます。洗剤を落とす時は、水で濡らし固く絞った雑巾で拭き取って下さい。



## センサーを消毒するには？

病院や施設で消毒に使われている次亜塩素酸ナトリウムを通常の消毒に使用する希釈度（0.1%以下）で使用する場合は問題ありません。

### ◎代表的な消毒液

ミルトン、ピューラックス、ピューリファン等

ご注意＊ 防水加工ではありませんので、水に浸けること（水洗い）は避けて下さい。

