











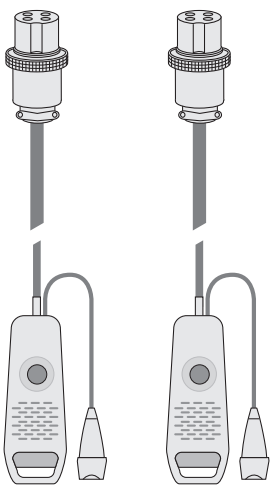
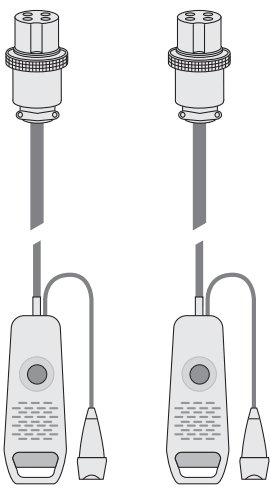
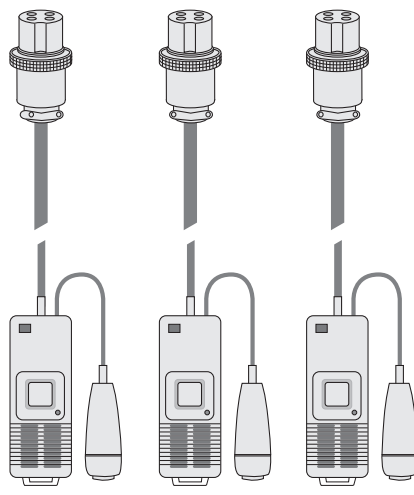
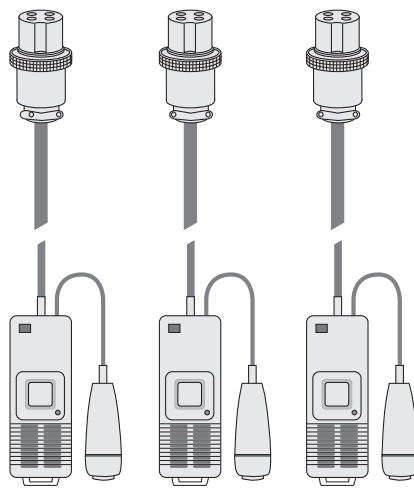
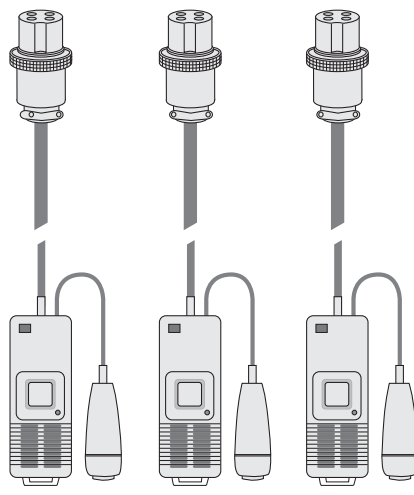
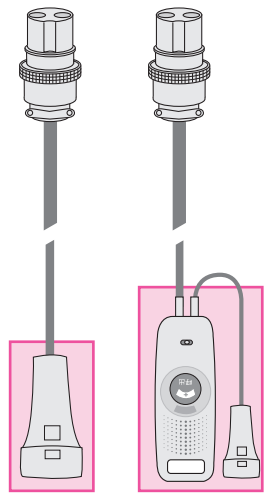
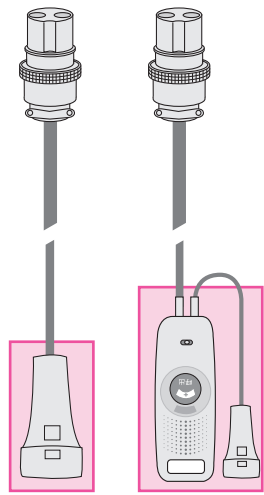
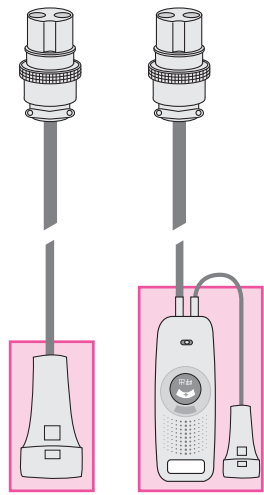
## ナースコール連動タイプ離床センサー 間違えやすいナースコール形状

### + こんな症状が出た場合、要チェック

- ☑ 報知しない。
- ☑ センサーが作動している間しか報知しない（センサー作動が止まると報知も止まる）
- ☑ 復旧ボタンを押しても報知音が止まらない。
- ☑ 通常とは異なる音で報知する。
- ☑ 廊下灯が点灯しない。

ナースコールによっては外見上ピン形状が同じでも、型番と報知の仕組みが異なるものがあります。また機種によっては型番が違って壁側への差込が可能なものもあります。上記の現象が起きた場合は、ハンド型子機の型番をご確認ください。下記に間違いやすいナースコールをあげてみました。

【間違いやすいナースコール形状参照図】

メーカー名	(株) ケアコム		アイホン (株)			パナソニック		
番号	⑧	⑨	⑥-B	⑥-C	⑥-E	②	⑩	
名称	ケアコム4P	ケアコム4PZ	アイホン4PB	アイホン4PC	アイホン4PE	トーコン2P	パナソニック2P	
弊社記号	C4	C4Z	A4-NB	A4-NC	A4-NE	T2	T2C	
ソケットの形状								
	見分けがつかない		見分けがつかない			見分けがつかない		
ナースコールスイッチの形状								
ナースコール子機型番 (1例)	※⑧⑨は型番を確認して下さい。 BA-511 BA-501 BA-511Z BA-501Z		※⑥-B,C,Eは型番を確認して下さい。 ⑥-Bは一部対応できない場合があります。 NB-RC/A NC-RC NE-RC					
確認方法	外見で見分けが付きにくい。 子機のフタを開け型番を確認する。		外見で見分けが付きにくい。 子機のフタを開け型番を確認する。			子機で識別する。 ・押ボタンのみ：②T2 ・ハンド子機：⑩T2C		