



床敷きセンサーに関する豆知識

＋ センサー固定、清掃方法、要チェック

Q センサーの固定にガムテープを使いたいけど大丈夫？

A 養生テープでの固定をおすすめします！

ガムテープの粘着成分がセンサーを縮めてしまい故障の原因となります。ガムテープより粘着成分が弱い養生テープは、縮みの原因になりにくいのでこちらを使用されることをおすすめします。ただし、長期間の固定はお止め下さい。



ガムテープを使用しセンサーカバーが縮んだ状態
(縮みが内部電極を圧迫し誤報の原因となります)

○ 養生テープ × ガムテープ

ガムテープと比べると粘着力が弱く、センサーを傷めずに固定できます。ホームセンターなどで購入できます。

粘着力が強く、センサーのカバーが縮む可能性があります。

Q センサーの汚れを取るには、どんな洗剤を使えばいいですか？

A 中性洗剤なら使用可能。但し、センサーを水に浸けないでください。

洗剤、クレンザーで中性タイプのものでしたら使用可能です。また、よごれがひどい場合はタワシでのこすり洗いも出来ます。洗剤を落とす時は、水で濡らし固く絞った雑巾で拭き取って下さい。



センサーを消毒するには？

病院や施設で消毒に使われている次亜塩素酸ナトリウムを通常の消毒に使用する希釈度（0.1%以下）で使用する場合は問題ありません。

◎代表的な消毒液

ミルトン、ピューラックス、ピュリファン等