



見えないセンサーに関する豆知識

＋ サイドセンサー・赤外線センサー設置方法のチェックポイント

Q サイドセンサーの設置方法がよくわかりません。

A 厚みがある箇所がセンサー部分です。この部分を上向きに設置してください。

厚みがある箇所がセンサー部分です。（点線箇所）
その面を上側に向け、マットレスに対し「コ」の
字型に巻きつけるように設置してください。



センサー部分は少し厚みがあります



センサー部分がマットレスの上側にくるように設置

Q 赤外線センサーの“テスト機能”について教えてください。

A “テストボタン”を押すと、赤色ビームが照射の向きを指し、音で検知する範囲を確認できるのでセンサー設置が簡単になります。

スイッチを OFF にした状態で、テストボタンを押すと約30秒間赤色ビームが点滅します。
赤色ビームで照射の方向を確認できると同時に、照射範囲内に物体を認識すると“ピー”という電子音が鳴り、検知範囲（0.5、1、1.5m 範囲の切替可）を確認できます。

スイッチを「OFF」にし、テストボタンを押す

赤いLEDが点滅し、範囲に人・物体を検知するとピー音が鳴ります。



LED だから目にやさしい！



運用時は「使用」に切り替えます

「使用モード」では音や光は発しません。

