



見えないセンサーに関する豆知識

＋ 赤外線センサー設置ひと工夫

Q 赤外線センサーの使用中に、センサーがずれてしまいます…

A 取り付け箇所の幅は“パイプ直径 25 ～ 40mm 板厚み 20 ～ 60mm”の範囲内かをご確認ください。

100 円ショップで売っている、すべり止めシートの上からクランプを固定してください。

すべり止めシートがクランプのグリップ力を補助しずれにくくなります。



100 円ショップ等で色々なタイプが売られています



すべり止めシートの上から固定

Q 床や台の上にセンサーを設置できますか？

A 直置き可能な「赤外線センサー固定スタンド」をオプションで販売しています。

自在クランプを固定スタンドに付け替えるだけで、床や台の上などに設置が可能です。詳しくは販売店にお問い合わせください。

