





コードレスセンサーに関する豆知識

2台のコールマット・コードレスが同時に鳴る

Q コールマット・コードレスを2名に使用中
1名がセンサーを踏むと2名同時にナースコールが鳴ってしまいます。
これって故障？

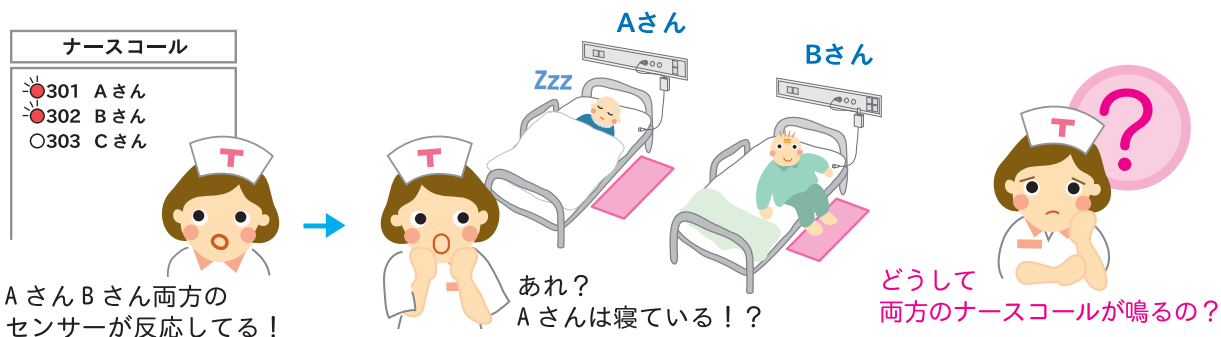

A Aさんの無線中継BOXにBさんのセンサーが重複して登録されています。

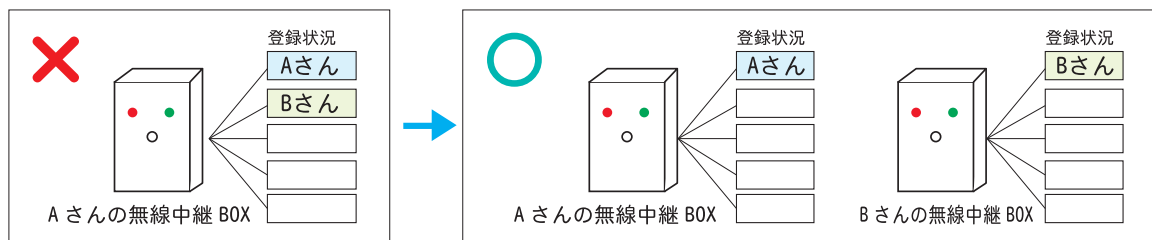

無線中継BOXはコードレスセンサーが最大5台まで登録可能で約10mの範囲内のセンサーを感知します。
登録し直すには、無線中継BOXの登録を一旦**全消去**し、必要なセンサーのみを**再登録**してください。

- 全消去**
- ①無線中継BOXの電源を入れる。
 - ②無線中継BOX側面の3つのボタン(黒・白・赤)を同時に長押し。
“ピッ”と音がすると全消去完了です。



- 再登録**
- ①無線中継BOXの電源を入れる。
 - ②無線中継BOX側面の黒・白2つのボタンを同時に押しながら、センサーに体重をかける。(ベッドセンサー、シートセンサーは体重をかけ難す)
“ピッ”と音がすると登録完了です。



ボタンを押しながらセンサーを動作させる。