



センサーの清掃に関する豆知識



コールマットの清掃方法について

Q コールマットを長期間使用していると、汚れが気になります。清掃方法を教えてください。

A コールマットは中性洗剤で拭き取りが可能です。

防滴仕様ですので水洗いできませんが、汚れがひどい時は下記の流れでセンサーを洗浄できます。

【コールマット清掃方法】



清掃に必要な道具類

(中性洗剤・拭取り用雑巾・ゴム手袋・ダンボール)



①床が汚れないようにダンボールの上にセンサーを広げる



② 中性洗剤を付けタワシで軽くこする
タワシで表面を軽くこするように汚れを取ってください。



③ 固く絞った雑巾で拭きとり後、乾拭き
センサーは防水仕様ではありません。必ず固く絞った雑巾で洗剤が残らないよう拭きとってください。最後に乾拭きをして完了です。



CHECK

コールマットに「センサーカバー」をかけて汚れを防ぐ！？

コールマット・コードレスをご使用中の名古屋市A病院で、センサーに「センサーカバー」を装着し汚れを防いでいらっしゃいました。

A病院では、院内の備品を一括管理されおり、コールマットを貸出す際は「センサーカバー」を付けて各病棟へ貸出し、返却後は汚れたカバーを取り替え、使い捨てで使用されているそうです。



センサーカバー装着イメージ

「センサーカバー」とは…

バイリンクリエイト株式会社より販売されています。防滴・防塵のカバーです。「センサーカバー」については、下記へお問い合わせください。



バイリンクリエイト株式会社
本社 東京都中央区築地 5-6-4
TEL.03-4546-1183
名古屋 TEL.052-203-4530
大阪 TEL.06-6121-9700