



今月のテーマ 「2014 秋新製品のご紹介 ～ vol.4 ～」

2014 年秋に発表しました新製品をご紹介！今月号は、新しくなりました「トイレコール」をご案内いたします！

5 トイレでの転倒防止に！ 「トイレコール」

専用受信器 に報知！

対象者が便座から立ち上がると専用受信器に報知します！



抗菌 防滴

「トイレコール」が床に敷くマットタイプに 新しく生まれ変わりました！

病院や施設内で起きる転倒事故の多くは病室内で、次いでトイレで多く起きています。トイレでの転倒事故を未然に防ぐためにテクノスジャパンのセンサーラインアップにはトイレに特化したセンサー「トイレコール」があります。

- 床敷きタイプですので、洋式トイレへの設置がカンタン！
- 対象者が便座から立ち上がるとセンサーが作動し専用受信器に報知！
- 座っている途中、瞬間的に腰を浮かす動作には反応しません！
誤報がなくお使いいただけます。



マット・トイレセンサー



専用受信器
ハイパー受信器10 (固定型) or ポケット受信器 (携帯型)

マット・トイレセンサーの動作仕様



【マットを踏む】
センサーに荷重がかかる




【便座に座る】
センサーにかかる荷重が少なくなる
※1秒以内の腰を浮かす動作は報知しません



【便座から腰を浮かす】
センサーに再び荷重がかかる
(1秒以上)

報知

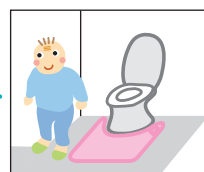

【マットから離れる】
センサーにかかる荷重がなくなる
(1.5秒以上)



報知

「トイレコール」の特長は…

- 便座から立ち上がると報知します！
- トイレの形を選びません！
- 清掃が簡単です！

簡単設置！ トイレの床に置くだけ！



従来のトイレセンサーは、便器に取付ける必要がありましたが、新しい「マット・トイレセンサー」は写真の様に便器に沿わせて置くだけです！