



ポケット受信器の音量変更について

Q 「ポケット受信器」を使用しています。
バイブレーションに設定してもサイレントモードになりません。
なぜでしょうか？



A サイレントモードは音量設定で行います。以下の手順で設定してください。

音量設定

- ① **メニューボタン** を長押し→(GR が点滅します)
- ② **決定ボタン** を長押し→(🔊マークが点滅します)
- ③ **上下キー** で音量を合わせます
- ④ **決定ボタン** を押す→(時間が点滅します)
- ⑤ **ON/OFF ボタン** を押し完了です

表示例



操作キーの名称



メニューボタン

上下キー

(シルバーの上下部分)

決定ボタン


ON/OFF ボタン

- ・長押しで電源のON/OFFができます。
- ・電源が入ると振動します。
- ・待受画面に戻ります。

バイブレーションの ON/OFF

- ① **バイブレーションボタン** を長押しして設定・解除ができます

表示例

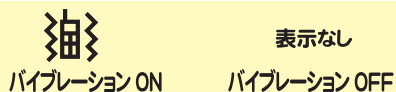

バイブレーションボタン

ポイント

夜間帯は入居者や患者様の目を覚まさないようにサイレントモードをご利用いただけます。

