




ベッドコール・ケーブルタイプの豆知識

Q 起き上がりを報知する「ベッドコール・ケーブルタイプ」を設置した所、対象者が横になるとナースコールが鳴りっぱなしになっています。




A センサーアダプタは接続されていますか？
「ベッドコール・ケーブルタイプ (BC-1)」は、センサーアダプタがないと体重がかかった時に報知してしまいます。

正常動作

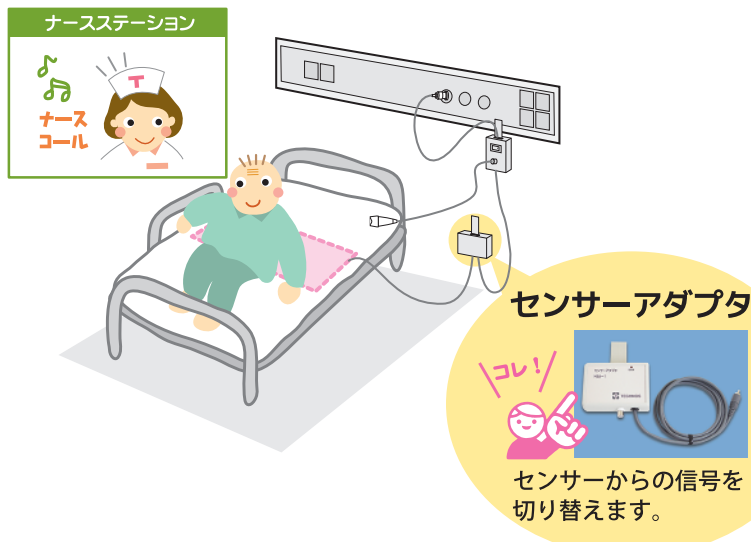

ナースコールが鳴りっぱなし

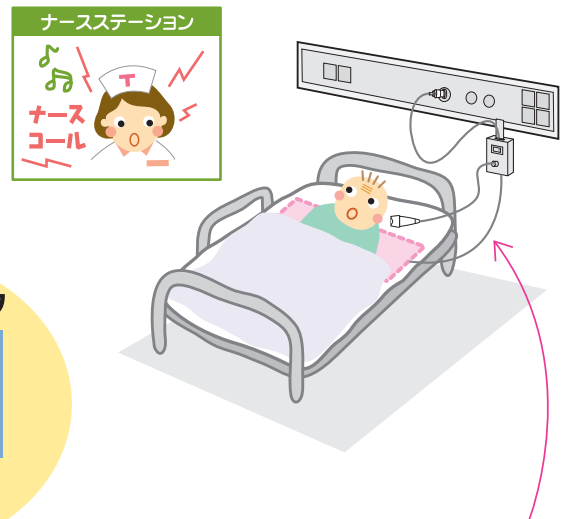

○ センサーアダプタあり

荷重がなくなるとナースコールが鳴る

× センサーアダプタなし

荷重がかかるとナースコールが鳴る

≡ 離床センサーはセットでの保管をオススメします！ ≡



セットでの保管は、センサー部材の紛失や破損を防止でき、また、組合せがバラバラになる事も防げます。

市販の衣装ケースがベッドコールにピッタリですよ！

(写真：東北薬科大学病院、旧東北厚生年金病院様)