



テクノス通信

Nursing
～ナースिंग～


7月
vol.86
2016

今月のテーマ 「離床センサーの保管について」

今月はお問合せが多い、離床センサーの保管方法について特集します！

センサー保管のコツ

その1. セットで保管

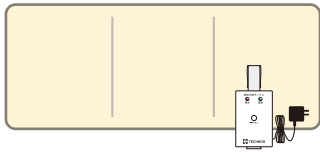


セットで保管することにより、部材の紛失がありません。

その2. センサーは平らな場所に寝かせて保管 (立てないでください)



センサーの故障を防ぎます。

その3. 電池は外しておく

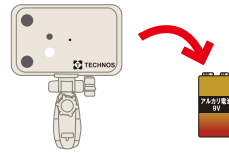

電池消耗と長期間保管時の電池の液漏れを防ぎます。

その4. 取扱説明書等を製品同梱で保管



使用方法など、いざという時にすぐに確認できます。



離床センサーを設置したあとに、「あれ？センサーが反応しない！」なんてことはありませんか？
構成を一緒に保管しておけば、いざというときにスムーズに使用することができます。
保管方法の一例を下記に挙げてみましたので、ぜひご参考にしてください！

1 「ベッドセンサー」の保管

B4 ジッパーケース (背幅30mm)
参考価格 100 円 (100 円ショップ)

★保管のポイント

ファイルの背に製品名シールを貼ると分かりやすいですよ！

対象製品：ベッドコール・ケーブルタイプ
ベッドコール・コードレス



ぴったりサイズ！
いいね！



2 「超音波・赤外線センサー」の保管

A4ジッパーケース (背幅30mm)
参考価格100円 (100円ショップ)

プラスチックケース
参考価格100円 (100円ショップ)



縦向き保管も
可能！いいね



箱を積み上げる
こともできる！



3 「コールマット」の保管

収納ボックス
参考価格 1,000 ～ 3,000 円
(通販ショップ)

★保管のポイント

センサーがシワにならないように、少し大きいサイズの箱を使用します。

対象製品：コールマット・コードレス
徘徊コールⅢ



セットでの
保管いいね！



★保管のポイント

・超音波・赤外線センサーの電源がOFFになっているか確認してください。

・長期間保管する場合は電池を本体から外してください。

ビニールケース

参考価格100円 (100円ショップ)



固定スタンドも
保管できる！



対象製品：超音波・赤外線コール、超音波・赤外線ポケット
家族コールCタイプ (ポケット)