




# テクノス通信



1月  
vol.92  
2017

今月のテーマ 2016 秋の新製品「徘徊ナビ名札」のご紹介

## 離棟・徘徊をキャッチする「徘徊ナビ名札」

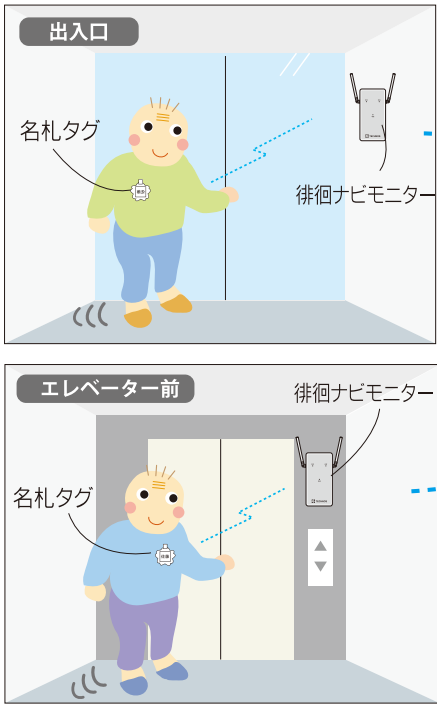

「徘徊ナビ名札」は名札型タグで対象者の徘徊・離棟を報知する製品です。タグは名札に収納しているので、対象者への取付けはクリップや安全ピンで簡単にでき、装着時の違和感を感じさせません。



対象者に気付かれにくく  
取付けも簡単です！

### 設置例

一時的にデイサービスを利用されているUさん  
認知症で徘徊があり、心配です。

認知症のUさんは、自宅でも家の中や外を歩き回り、たえず徘徊行動が見られます。施設外へ1人で出てしまうのは危険ですので、徘徊ナビ名札を衣服に取付け、玄関に近づくと報知するようにしています。



### 関連製品「徘徊ナビ」との違いは？

今号でご紹介している「徘徊ナビ名札」のほかに、離棟・徘徊を報知する製品で「徘徊ナビ」があります。仕組みは同じですが、対象者に取付けるタグの形状や場所が違います。

「徘徊ナビ名札」の名札タグは文字通り胸や衣服に取付ける名札型です。一方、「徘徊ナビ」のタグは手首又は足首に取付け、対象者自身では取外しができず、専用の治具を使わなければ外せない腕時計型です。徘徊ナビモニターは共通で使えるので対象者に合ったタグをお選びください。

	取付け箇所	取付け方法	取外し方法
	手首 又は 足首	ベルトで 固定	治具を用い 取外す
	衣服	安全ピン 又は クリップ	特になし

徘徊ナビモニター 1 台で「タグ」や「名札タグ」を 30 個まで混在してご利用いただけます。



### 取付けがカンタン！

衣服にクリップ又は安全ピンでかんたんに取付け、取外しができます！



### 電池長持ち約 1 年

名札タグの電池寿命は約 1 年間です。また、電池消耗はランプやアラーム音でお知らせします。

