



## コールマットに関する豆知識

**Q** 床に敷いているコールマットの上に、人以外のものが乗っても大丈夫ですか？


**A** 車いす、ストレッチャー、ベッド、点滴スタンドなど局部的に荷重がかかるものはコールマットの上に乗せない、通らないようにしてください。  
移動時にコールマットが邪魔になる場合は、一時的にセンサーを収納してください。



車いす



歩行器

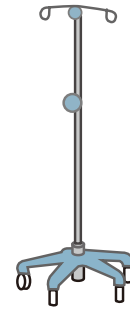

点滴スタンド




ポータブルトイレ




### コールマットの一時的な収納方法

広げたままベッドの下へ

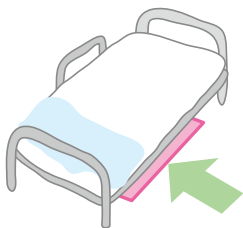

折り曲げ線で折りたたむ

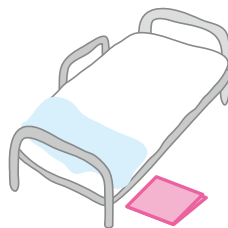

**!** 忘れず元通りの位置へ！  
注意



### 収納する必要がない離床センサー

超音波・赤外線センサー



ベッドセンサー



その他  
タッチセンサー  
サイドセンサーなど