




スマットに関する豆知識①

Q スマットはどんなセンサーですか？



A スマットは「患者・入居者」と「スタッフ」を識別するセンサーです。
靴のまま踏んでも報知せず、靴を履いていない「患者」が踏むと報知します。

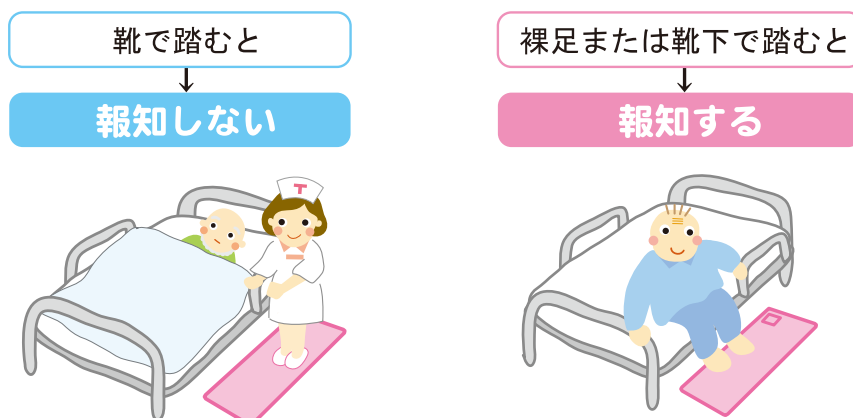

Q スマットが報知しない時の確認事項を教えてください。

靴でも報知してしまう場合・・・



靴を履いているのに報知をしてしまいました。なぜ？

- ✓靴が濡れてませんか？
まれに誤作動を起こし報知することがあります。
→ 靴の水分をしっかりと拭き取ってください。

裸足で報知しない場合・・・



裸足で踏んでも報知しません。

- ✓センサー ID の登録が外れていませんか？
→ 再登録をしてください。
- ✓無線中継ボックス・ハイパー中継ボックスの一時停止機能が働いていませんか？
→ 電源を入れなおし一時停止機能を OFF にしてください。
- ✓設置前にセッティングはしましたか？
→ 設置前は必ずセッティング作業※を行ってください。

※セッティングについての詳細は次号特集いたします！



センサーを踏んでも無駄な報知がなくなるので、ベッド周りの作業がはかどります！