

今月のテーマ **新製品「お散歩コール」のご紹介**

新発売した「お散歩コール」は、外出(徘徊)時にアラーム音で知らせる「徘徊感知機器」の機能に加え、外出中に異常があれば“位置情報”をメールで知らせる「オプションサービス」を利用できる製品です！

貸与マーク取得

お散歩コール

TAIS:00318-000179

新発売



極小・軽量のセンサーによる感知

杖や歩行器に付けても違和感のない7cm・60gのセンサー

複合機能付き = (オプションサービス)

「位置情報」を家族へメール通知

簡単な設定・手間のない手続き

専用アプリで、設定もクレジット決済もらくらく



お気に入りの杖や歩行器に取付けます。



1. 徘徊感知機器として使用

介護保険レンタル


「お散歩タグ」を持った利用者が屋外へ出ると、「見守ガイド」からアラーム音が鳴り介助者に知らせます。

対象

認知症高齢者と同居して見守る家族

例えばこんな方に…

- マットタイプのセンサーではうまくいかない人
- 独り歩きができる活発な人
- アラーム音だけの通知が欲しい場合

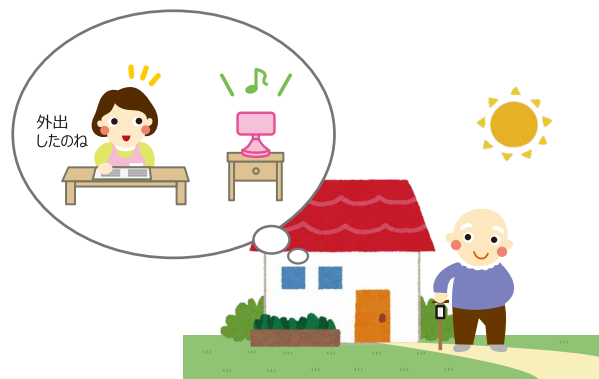

オプションサービス を付加できます

*オプションサービス

2. 複合機能付き『徘徊感知機器』として使用

介護保険レンタル

+

オプションサービス
自費(月額 300 円)

「お散歩タグ」を持った利用者が外出中に、普段の行動範囲や時間を過ぎると、“位置情報”を介助者へメールします。

対象

外出する高齢者とその見守りをしたい家族

例えばこんな方に…

- 利用者と同居しているが、
家族が目を離すタイミングがあり徘徊が不安…
- 利用者はいつも問題なく独りで外出できているが、
何かあった時に知りたい…




設定例

外出距離アラーム

予め設定した距離以上、利用者が移動した場合に知らせます

「3km」と設定した場合 3km を越えるとメールとともに
現在地情報のお知らせが届きます

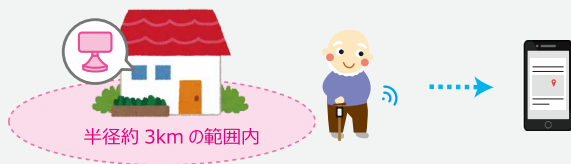

外出時間アラーム

予め設定した時間内に利用者が帰宅しない場合に知らせます

「2 時間」と設定した場合外出時間が 2 時間を越えると
メールとともに現在地情報のお知らせが届きます



他にも、利用者が現在地を介助者に知らせる「あんしん通知」など多数の機能が利用できます

お散歩アプリ

オプションサービスのお申込みや設定等は「お散歩アプリ」より
行っていただけます！



お散歩アプリテクノス

iPhone OS11 以上
Android 5.0 以上対応

お散歩コールは全国の卸・事業者様で採用予定です。
お取り扱いについては各卸・事業者様へ、
製品については「お客様相談室」へ、ぜひお問い合わせください！

