

テクノス通信 VOL. 29 Oct. 2011



「国際福祉機器展 H.C.R. 2011 出展レポート&ステージご紹介」



10月5日～7日の3日間、東京ビッグサイトで開催された「第38回 国際福祉機器展H.C.R. 2011」に出展いたしました。今回はその展示会のレポートと、ステージデモをご紹介します。


展示会名：第38回 国際福祉機器展 H.C.R. 2011
 会場：東京ビッグサイト
 会期：2011年10月5日～10月7日
 出展企業：510社
 来場者数：118,154人（3日間累計）
 来場者層：ケアマネジャー、介護職員、医療従事者、建築設計関係者、製造・販売業など



テクノスジャパン社員による『離床センサー活用ステージ』と『離床センサー入門ステージ』を行い、ご好評を頂きました！

離床センサー活用ステージ

床敷きセンサーを使っている「特養テクノスホーム」を舞台に「離床センサー活用編」！

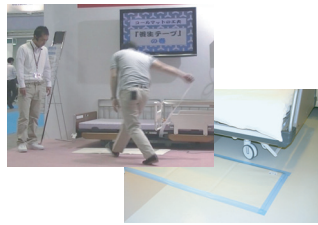

①養生テープを使って安心設置！

「養生テープ」をセンサーの周りに貼ることで、すり足の引っ掛けや、蹴ってセンサーの位置が変わることを防げます！
 また、剥がす時に痕が残りません！



①避けてしまう人には気づかれにくいセンサー設置！

「センサーが鳴らなかった」「気づいたら患者が廊下に出ていた」という、床敷きセンサーを避けてしまうことでの課題。その1解決案として、シーツに隠せたり、設置が気づかれにくいセンサーがあります。

離床センサー入門ステージ

離床センサーのラインアップをご紹介「離床センサー入門編」！



コールマット	ベッドコール	サイドコール	タッチコール
ベッドから立ち上がった時	ベッドから起き上がった時	ベッドの端に寄った時	ベッド欄を握った時
介助バーコール	赤外線コール	ピローコール	
介助バーを握った時	赤外線照射範囲に入った時	頭を持ち上げた時	

センサーラインアップとその対象者、設置ポイントをご紹介します！

また、ナースコールを必要としない「離床センサー専用受信器」や、気になる電波の問題もご説明！



たくさんのご来場、ありがとうございました！

ステージの続きはCDで！



「転倒・転落対策CD2011」をプレゼント！

今回のステージや製品紹介の様子を収めた、『転倒・転倒対策デモ実演CD2011』をご用意いたします。お申込み頂いた方には無料でご発送しますので、この機会にぜひご覧頂き、転倒・転落対策のヒントにして頂ければと思います！*発送は11月中旬予定。お申込はこちらから：e-group@technosjapan.jp（タイトルにCD2011申込とご記載下さい）