



# 「サイドセンサー」設置・保管方法について



**Q** サイドセンサーについて設置のコツや、収納方法を教えてください。

**A** 巻き込んで設置するサイドセンサーですね！  
ご案内いたします。



## 「サイドセンサー」ってどんなセンサー？

ベッドサイドにサイドセンサーを設置し、ベッドから降りようとするタイミングで知らせて欲しい人や、床敷きセンサーよりも早い検知が必要な方に向いています。



運用時にはシーツの下にサイドセンサーを設置します。

## 設置する時のコツは？

サイドセンサーのセンサー部（体重がかかると作動する部分）は、上側 1/3 部分になります。この面をマットレスの上面に来るようにマットレスに巻き付けます。この時、裏面のマジックシートがマットレスに固定されるか確認してください。



## 保管方法は？

折り曲げ位置で谷折りにし、保管時にズレがないように保管してください。



↑  
折り曲げ位置(谷折り)



ズレている



そろっている