



## 離床センサーの清掃方法について



Q 離床センサーの清掃方法を教えてください。

A 清掃方法は下記のとおりです！  
正しく清掃することで永く衛生的にご使用いただけます。



### 清掃方法

抗菌

マットスイッチ ベッドセンサー  
(PVC 製)



中性洗剤をつけ、固く絞った雑巾で拭き取り  
乾拭きする

\*マットスイッチはブラシで軽くこすってから雑巾で  
拭き取るときれいになります！

注意：防水仕様ではありませんので水洗いはしないでください。

赤外線センサー 中継ボックス  
(ABS 樹脂製)



中性洗剤をしみこませた雑巾で拭く

注意：アルコールタオルもご使用になれますが、  
強くこすると表面ラベルが剥がれることが  
あります。防水・防滴仕様ではありません  
ので、洗剤を直接吹き付けることや、水洗  
いはしないでください。

\*付着した洗剤は拭き残しがないようにしっかり拭き取って、十分に乾かしてください。

### 【デモ機について】適切な清掃・消毒を行い出荷しています



次亜塩素酸ナトリウムをウエスに浸透し、清拭の上、  
溶液をしっかりと拭き取り出荷しています。



清掃・消毒済みのデモ機には  
証明書を添付しています。

安心して転倒・転落対策にご使用いただけます。