



# コードレスセンサー登録 & 全消去 方法



**Q** コードレスセンサーを踏んでも、ナースコールが鳴りません。  
無線中継ボックスの報知ランプも光りません、どうすれば良いでしょうか？

**A** 無線中継ボックスにコードレスセンサーを「登録」しましょう！  
念のため下記の手順で「全消去」をしてから「登録」してください。



組合せ例

各種コードレスセンサー



+

無線中継ボックス  
(HCBR-3)




または

ハイパー中継ボックス  
(HCBH-1)



## 1 「全消去」方法

- ① ACアダプタを接続し、電源をONにする。
- ②「消去」ボタンを長押し。(全「ランプ」が点滅)  
\*点滅せずにピピピピと音が鳴る場合は全消去済(登録なし)。→②へ
- ③再度「消去」ボタンを長押し。(全「ランプ」が点滅)
- ④「消去」ボタンをピピッと音が鳴るまで押す。
- ⑤「ランプ」が消灯すれば完了。

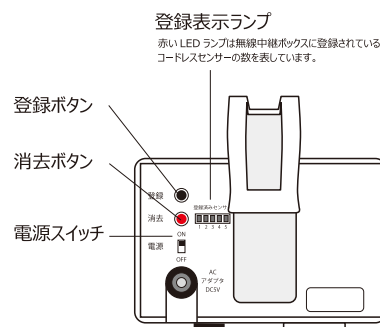

無線中継ボックス (裏面)

## 2 「登録」方法

- ① ACアダプタを接続し、電源をONにする。
- ②「登録」ボタンを長押し。(全「ランプ」が点滅)
- ③登録したいコードレスセンサーを作動させる。(例) マットスイッチを踏む、ベッドセンサーから起き上がる
- ④ピーッと音が鳴り「ランプ」が1つ点灯すれば完了。



こんな症状がでた時も上記①②を行ってください。

その他の症状

- ・何もしていないのにナースコールが鳴る
- ・2つのコードレスセンサーが連動してナースコールが鳴る

上記の手順で解決しない場合、他の原因が考えられます。商品を購入いただきました販売店様へご連絡をお願いします。