



# 楽コールにセンサーを増設

Q



楽コール・ハイパーを使用しています。  
**センサーを追加したいのですが、できますか？**  
 また、どんな方法がありますか？

楽コール・ハイパー



A

楽コールにセンサーを増設する方法は様々です！  
 まずどんな種類のセンサーがいいのか？呼出し、またはセンサー作動時の  
 区別は必要か？がポイントです！



## マットスイッチ 増設 (受信の識別不可)


必要な部材は、2分岐ハーネスとマットスイッチです。  
 楽コールと同じ送信器を利用するので受信時の識別はできません。  
 マットスイッチ以外のセンサーに置き換えることもできます。




その他のセンサー ベッドセンサー、サイドセンサー、タッチセンサー

## 超音波・赤外線センサー 増設 (受信の識別可能)

必要な部材は、ハイパー超音波・赤外線センサーです。  
 楽コールの送信器を使用しないので、受信器時の識別が可能です。  
 また、超音波・赤外線センサーは、離れた場所でも設置できます。

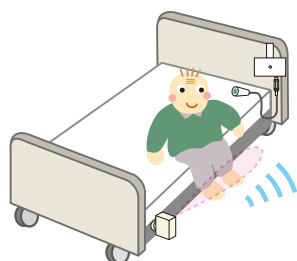

その他の設置例

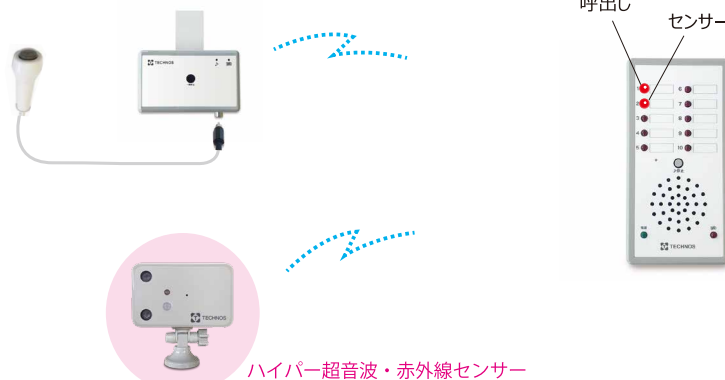

その他のセンサー ハイパー・マットスイッチ