



# 超音波・赤外線センサーの設置場所




Q

超音波・赤外線センサーはどこに設置できますか？

取付具を変えることによって、様々な場所に設置ができます！  
患者のADLによって変更できるのが特長です！



病室

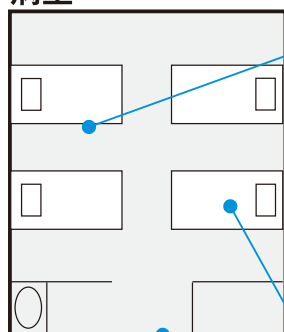

廊下

## 設置例① <ベッドからの離床を検知>

設置場所：ベッドの降り口など  
検知距離設定：0.5m  
検知時間設定：0.5秒



マグタッチ  
使用



## 設置例② <ベッド上の起き上がりを検知>

設置場所：ヘッドボード、  
フットボードなど  
検知距離設定：1m～1.5m  
検知時間設定：1秒～2秒



クランプ  
使用



## 設置例③ <部屋からの移動を検知>

設置場所：出入口付近の足元など  
検知距離設定：1.5m  
検知時間設定：0.5秒



スタンド  
使用 ※オプション

