



離床センサーの清掃方法



Q

離床センサーの清掃方法をおしえてください！

センサーの清掃・消毒、部材の清掃方法を紹介します！
清潔なセンサーでリフレッシュしましょう♪



正しく清掃・消毒することで永く衛生的にご使用いただけます。

■ センサー（PVC 製）の場合

マットスイッチ 抗菌



中性洗剤を付け、ブラシで軽くこする
固くしぼった雑巾でふき取り、乾拭き

注意：防水仕様ではありませんので水洗いはしないでください。



ベッドセンサー 抗菌



中性洗剤を付け、
固くしぼった雑巾でふき取り、乾拭き

注意：防水仕様ではありませんので水洗いはしないでください。



抗菌 テクノスジャパンの離床センサーは、抗菌剤を含有し、抗菌性に優れたものを使用しています。

■ 中継ボックス、送信器、受信器（ABS 樹脂製）などの場合



中性洗剤をしみこませた雑巾で拭く




注意：アルコールタオルもご使用になれますが、
強くこすると表面ラベルが剥がれることがあります。
防水・防滴仕様ではありませんので、洗剤を直接
吹き付けることや、水洗いはしないでください。

■ センサーを消毒するには

使用するもの：次亜塩素酸ナトリウム(希釈度 0.05%)

- ①ウエス・ぞうきん等に浸透させて清拭してください。*1
- ②溶液が残らないようにしっかりと拭き取ってください。*2

注意：*1) 溶液を直接浸けないでください。
*2) 溶液が残っていると脱色や錆につながる可能性があります。

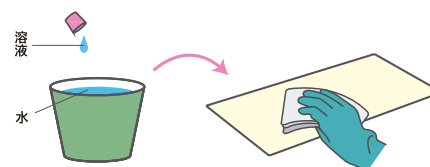

離床センサー清掃方法を
動画（約1分）でご紹介しています ▶

