



離床センサーの収納特集



Q

センサーの収納についてポイントがあれば教えてください。

みなさん、いろんな方法で離床センサーを管理されており、収納にも工夫が見られます。とても参考になるので、一部をご紹介しますね！



カゴ

に… 超音波・赤外線コール を収納



カゴの側面には構成品の写真と内容が分かりやすく表示されています！

ポイントは、**ON/OFF カードが同梱**されている点です。

ベッド近くに表示し、電源状況が確認できるカードがセットになっています！
使用開始段階から電源入れ忘れがないように意識できますね！



ON/OFF カード（両面）

ステキ！
POINT

ON/OFF カードがセットになっている！

工具箱

に… 徘徊ナビ を収納



こちらも構成品の写真と内容が分かりやすく表示されています。

さらに、**取扱説明書のコピー**も合わせて添付されていました。
設定を変更したいとき、すぐに
対応できますね！



取扱説明書

ステキ！
POINT

取扱説明書が同梱されている！

タッパー

に…

中継ボックス（無線中継ボックス）を収納



ケーブルもまとめてタッパーにすっきり収納されています。タッパーなら**棚にも重ねて収納できます**。タッパーとマット双方にナンバリングされておりセンサーとのペアリングを崩さず、すぐに使用できますね！



ステキ！
POINT

タッパー利用の収納術！


三脚ケース

に…

タッチコールを収納



カメラの三脚ケース

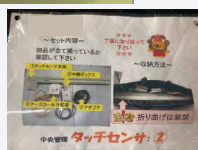

セット内容と注意点

旧タイプのタッチセンサーは折り曲げ厳禁！
そのままの形をキープできるよう、**三脚ケースに収納**しています。すぐに使えるよう必要な部材をまとめて収納されています。添付されている紙には、**注意点**など写真やイラストを使って分かりやすく案内されています！素晴らしいです！



ステキ！
POINT

三脚ケースを使用する柔軟さ！持ち運びがしやすく、感動しました！