

**今月のテーマ 離床センサーの清掃方法・注意点について**

関東甲信越地方も梅雨入りしいよいよ本格的な梅雨ですね。湿度が高く不快な梅雨時期を、少しでも快適に乗り切るため、センサーをスッキリ綺麗にしませんか？今月号では、離床センサーの清掃方法をご紹介します。マットスイッチは清掃することにより機能改善する場合があります！

**センサー類** ※PVC 素材の物 例：マットスイッチ、ベッドセンサー、サイドセンサー 等

**マットスイッチ**



**中性洗剤を付け、ブラシで軽くこする  
固くしぼった雑巾でふき取り、乾拭き**

注意：防水仕様ではありませんので水洗いはしないでください。



**ベッドセンサー  
サイドセンサー**




**中性洗剤を付け、  
固くしぼった雑巾でふき取り、乾拭き**

注意：防水仕様ではありませんので水洗いはしないでください。



**コードもしっかりと拭きましょう！**

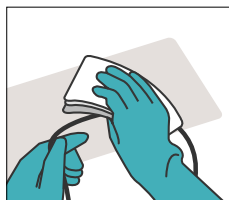

**意外！**

コード部分も意外と汚れが付いています！固く絞った雑巾で拭き取ってください。

**マットに付着している粘着成分（テープの跡）を取るには？そのままにしておく？**



**キケン！**

ベタベタな粘着成分も中性洗剤が有効です。粘着成分が残っているとその成分の影響でマットが縮み故障を誘発しますので注意してください。

**センサーの消毒方法** センサーの消毒は 0.05%の濃度の次亜塩素酸ナトリウム希釈液を使用します。

使用するもの：次亜塩素酸ナトリウム（希釈度 0.05%）

- ①ウエス・ぞうきん等に浸透させて清拭してください。\*1
- ②溶液が残らないようにしっかりと拭き取ってください。\*2

注意：\*1)溶液を直接浸けないでください。  
\*2)溶液が残っていると脱色や錆につながる可能性があります。



溶液

+

水

**中継ボックス、送信器、受信器 類** ※ABS 樹脂の物 例：中継ボックス、ハイパー送信器、ハイパー受信器、赤外線センサー等

**中性洗剤をしみこませた雑巾で拭く**

注意：アルコールタオルもご使用に出来ますが、強くこすると表面ラベルが剥がれることがあります。防水・防滴仕様ではありませんので、洗剤を直接吹き付けることや、水洗いはしないでください。

