



専用受信器のメロディ変更について



受信器のメロディを変更したいのですが、どうすればいいですか？


設定により変更方法が変わります。

ダイヤル設定、ペアリング設定で違いますので確認しましょう！




まず最初に、設定を確認しましょう！

ダイヤル設定またはペアリング設定によってメロディ変更方法が違います。まずは、ハイパー送信器（ハイパー超音波・赤外線センサー）の裏面の設定スイッチを確認してください。

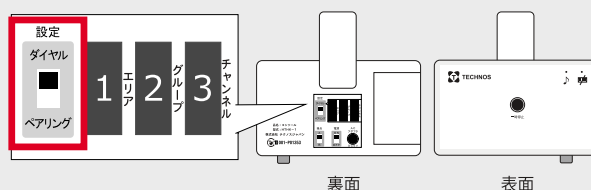


ダイヤルの場合

ダイヤル設定の場合、メロディを変えるには、送信器の裏面にあるチャンネル（数字）を変更するとメロディが切り替わります。

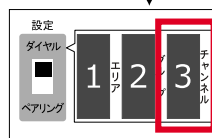

ダイヤル設定時は送信器のチャンネルを変更します。

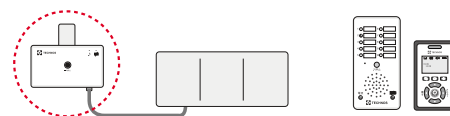

数字を変える毎に、メロディも変わります。また、番号表示も変わりますよ！




ペアリングの場合

ペアリング設定の場合、メロディを変えるには、ペアリングの消去後、希望するメロディの番号に再ペアリングをします。

ペアリング設定時は主に受信器とセンサーの操作を行います。



ハイパー受信器

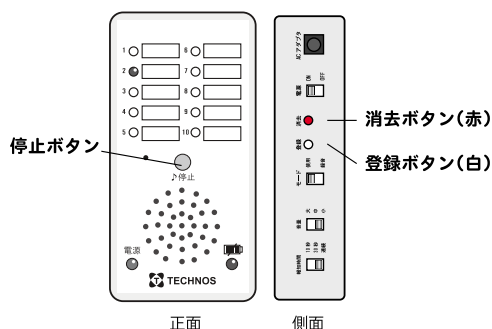

ペアリング消去方法


- ①ハイパー受信器側面の消去ボタンを長押し → 全てのLEDランプが点滅します。
- ②消去したいセンサーを作動させると番号が点灯します。
- ③消去ボタンを押すと早点滅後に消灯します。

再ペアリング方法

- ①側面の登録ボタンを長押し → 番号が点滅します。
- ②停止ボタンで登録する番号に切り替えます。
- ③再ペアリングしたいセンサーを作動させるとランプが早点滅後に消灯し再ペアリング完了です。

メロディが変わっているか動作チェックをしてください。

スマート

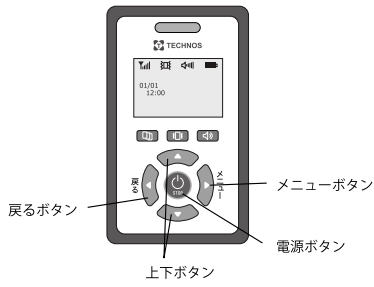

ペアリング消去方法

- ① メニューボタンを長押し
- ② センサー消去を選択
- ③ 一件消去を選択
- ④ センサー作動させ、電源ボタンを長押しする
- ⑤ 戻るボタンで待ち受け画面に戻ります。

再ペアリング方法

- ① メニューボタンを長押し
- ② 受信機能選択を選択
- ③ ペアリングを選択
- ④ センサー登録を選ぶ
- ⑤ 上下ボタンでメロディを選ぶ
- ⑥ 再ペアリングしたいセンサーを作動させます。
- ⑦ 電源ボタン長押しで確定します。
- ⑧ 戻るボタンで待ち受け画面に戻り再ペアリング完了です。

メロディー一覧

多機能受信器スマートおよびハイパー受信器のチャンネル（登録番号）ごとのメロディは以下の通りです。

1	ハイ・ホオ	6	未来予想図II
2	青春の輝き	7	電子音①
3	カノン	8	電子音②
4	瞳がほほえむから	9	電子音③
5	Here comes the sun	10	電子音④