



アイホンVi-nurse「オプション入力コンセント・コード」について



ナースコールはアイホンのVi-nurseを使用しています。離床センサー導入にあたり「オプション入力コード」が必要かどうか、どのように確認すればよいでしょうか？



「オプション入力コード」が必要かは、まずは「オプション入力コンセント」が
お部屋にあるかどうかによって判断します。下記イラストをご参照ください。

ベッドまわり
イメージ（例）



オプション入力コンセント
センサーを接続する専用のコンセントです。

オプション入力コンセントの有無を確認する

離床センサーを使用するお部屋に
「オプション入力コンセント」があるかをご確認ください。

ある 場合

オプション入力コードが「不要」


オプション入力コンセントに無線中継ボックスの
プラグをつなぎます。

ない 場合


オプション入力コードが「必要」

オプション入力コードを介して、
無線中継ボックスのプラグをつなぎます。

< 接続イメージ >

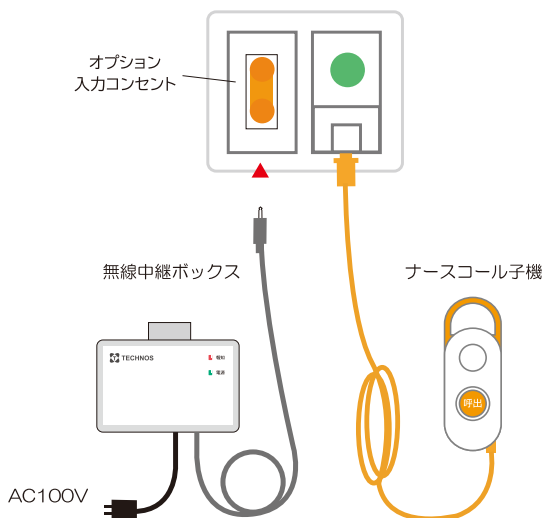

< 接続イメージ >

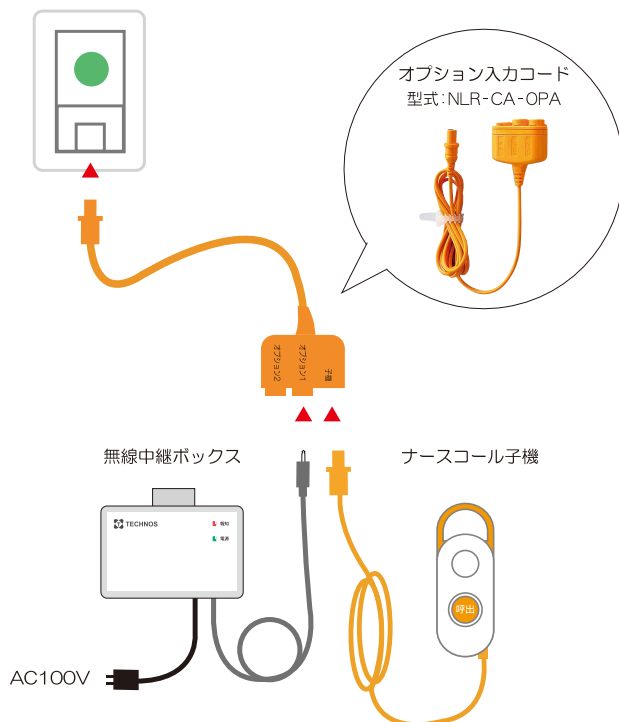

今回例にあげているのは、無線中継ボックス（コードレスタイプ）を接続する場合です。中継ボックス（ケーブル）の場合は、無線中継ボックスを中継ボックスに置き換えてイメージしてください。