



## ナースコール形状の特定方法



新しく離床センサーを購入予定ですが、ナースコール形状はどのような流れで確認するのか、手順を教えてください。


ナースコール形状の特定方法は、  
①ナースコールメーカー②部屋のソケット形状を調べてください。



### 【ナースコール形状の特定方法】


#### 1 ナースコールメーカー を調べる。

例) ケアコム、アイホン、ナカヨ、NTTなど

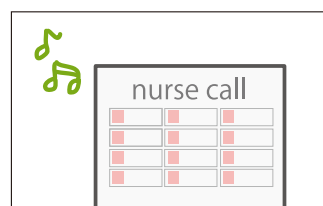


#### 2 ナースコールスイッチを外し、ソケット形状を確認する。

実際にご利用いただくお部屋のナースコールスイッチを取り外し、壁側のソケット形状を確認してください。

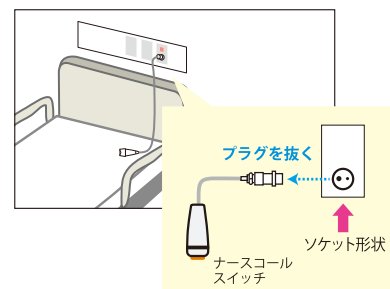


#### 3 ナースコール参照図 から形状を特定する。

ソケット形状とナースコール参照図を照らし合わせ、ナースコール形状を特定してください。  
ナースコールの子機型番からでもナースコール形状を特定できます。

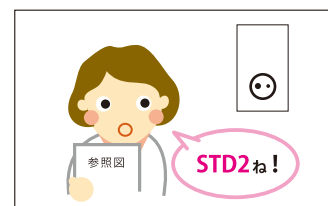

#### 4 ご注文・デモ機申込時に、弊社記号をお伝えください。

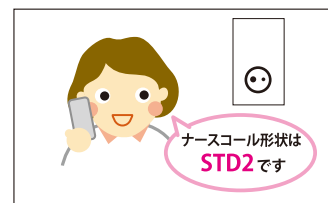


#### その他の確認方法

**ナースコールの子機型番からもソケット形状を特定できます！**

参照図よりご確認ください。

＼ ナースコール子機の型番確認 /

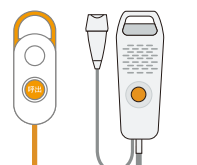

▼ ナースコール参照図は次ページをご覧ください。▼

# ナースコール参照図

メーカー	(株) ケアコム / アイホン (株)				(株) ケアコム					パナソニック		ナカヨ	NTT
番号	①	②	③	④	⑧	⑨	⑮	⑯	*⑱	②	⑩	⑳	㉑
名称	標準2P	トーン2P	標準3P	6mmプラグ	ケアコム4P	ケアコム4PZ	ケアコム5P	ケアコム6PF	ケアコム6PW	トーン2P	パナソニック2P	ナカヨSP	アンシンSP
弊社記号	STD2	T2	STD3	6P	C4	C4Z	C5	C6F	C6W	T2	T2C	NSP	ASP
ソケット形状													
ナースコールスイッチ形状													
ナースコール子機型番 (一例)	RB-822 RB-822A RB-822C RB-822A-C NBR-8A/A NBR-8A-C				※⑧⑨は型番を確認してください。 BA-511 BA-511Z BA-511A BA-511ZA BA-501 BA-501Z BA-501A BA-501ZA					RB-830Z BA-502Z BA-501Z RB-826WZ BA-601WZ BA-602WZ		VHR-560C BVH-R560C	
										子機の形状で識別してください。押ボタン② ハンド子機⑩		※⑳㉑はメーカーを確認してください。	

\*⑱ケアコム社製 WZ子機(旧Wellシリーズ)の場合は、別途ケアコム社製「分配コンセント」が必要です。



### ケアコム社製分配コンセント

- 名称: 分配コンセント (2P、W6P、一般) 型式: BB-301WZ-2P/W6P-NC
- 名称: 分配コンセント (2P、W6P、特定1) 型式: BB-301WZ-2P/W6P-OP1

メーカー	アイホン (株)										ジーコム		
番号	⑤	⑥-B	⑥-C	⑥-E	⑦	⑪	⑫	⑬	⑭	*⑰	⑳	㉑	
名称	アイホン2P	アイホン4PB	アイホン4PC	アイホン4PE	アイホン5P	アイホン5PNF	アイホン6PNF	アイホン3P	アイホン3PNF	アイホン6V	ジーコムRC	ジーコム2P	
弊社記号	A2	A4-NB	A4-NC	A4-NE	A5	A5NF	A6NF	A3	A3NF	A6V	GRC	G2	
ソケット形状													
ナースコールスイッチ形状													
ナースコール子機型番 (一例)	UAR-8 UBR-8				※⑥-B、C、Eは型番を確認してください。⑥-Bは一部対応できない場合があります。 NB-RC/A NC-RC NE-RC			UA-SB8 UB-SB8		NFR-8A NFR-8 NF-SBA NF-SB		NL-SB NLR-8 NLR-8-TT	
											このタイプは別途、オプション入力コードが必要な場合があります。 黄色のケーブル		
											⑬⑭は、AとBの2種類がありますので、確認が必要です。 下記の方法でご確認ください。 A: 廊下灯で復旧 B: ステーション・廊下灯で復旧		

\*⑰アイホン社製「Vi-nurse」シリーズの場合は、壁に「オプション入力コンセント」があるかをご確認ください。無い場合、別途「オプション入力コード」が必要です。



### オプション入力コンセント



- 名称: オプション入力コード 型式: NLR-CA-OPA