



## ナースコール新形状について



当院のナースコールが、**ケアコムEXシリーズ**を採用しました。  
離床センサーの接続方法や部材を教えてください！

**ケアコムEXシリーズ**は弊社ナースコール対応のラインアップに  
新しく加わりました！詳しく下記をご覧ください！



### New ケアコムEXシリーズ (写真の子機を使用) 場合 (ナースコール参照図⑭の場合) ※2024年取扱い開始


ナースコール子機



センサー接続には、分配コンセントが必要です。

| 名称           | 型式          | 識別   | 外観 |
|--------------|-------------|------|----|
| 分配コンセント (2P) | BB-301EX-2P | 識別不可 |    |

イメージ ケーブルタイプの場合 (コードレスタイプも可)

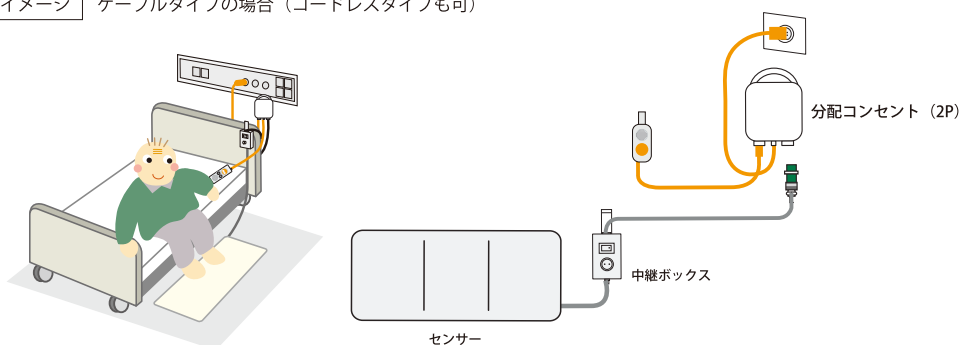

### ケアコムWELLシリーズ (写真の子機を使用) 場合 (ナースコール参照図⑱の場合)


ナースコール子機



センサー接続には、下記どちらかの分配コンセントが必要です。

| 名称                   | 型式                  | 識別         | 外観 |
|----------------------|---------------------|------------|----|
| 分配コンセント (2P、W6P、一般)  | BB-301WZ-2P/W6P-NC  | 識別不可       |    |
| 分配コンセント (2P、W6P、特定1) | BB-301WZ-2P/W6P-OP1 | 識別可 (設定必要) |    |

イメージ ケーブルタイプの場合 (コードレスタイプも可)

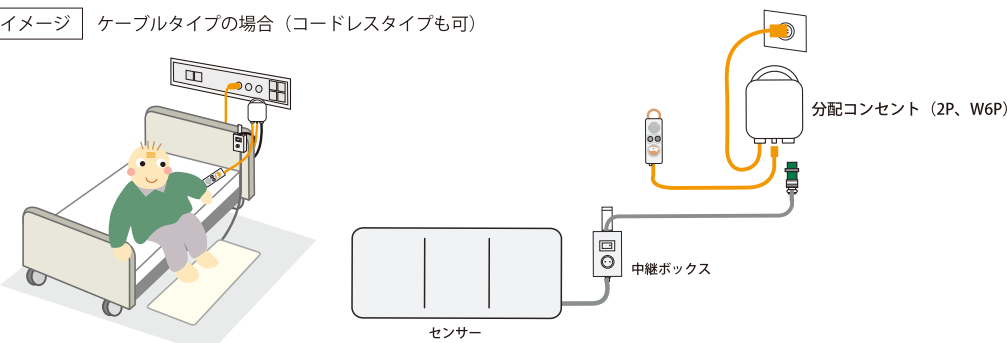

恐れ入りますが、価格に関してはお取引のある販売店様にお問い合わせください。

ナースコール参照図

| メーカー                   | (株) ケアコム / アイホン (株)                                               |        |      |        | (株) ケアコム                                                                               |         |         |                    |                                  |                                  | パナソニック                |          | ナカヨ                | NTT    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------|
| 番 号                    | ①                                                                 | ②      | ③    | ④      | ⑧                                                                                      | ⑨       | ⑮       | ⑯                  | * ⑱                              | * ㉔                              | ②                     | ⑩        | ㉔                  | ㉔      |
| 名 称                    | 標準2P                                                              | トーコン2P | 標準3P | 6mmプラグ | ケアコム4P                                                                                 | ケアコム4PZ | ケアコム5P  | ケアコム6PF            | ケアコム6PW                          | ケアコム6PE                          | トーコン2P                | パナソニック2P | ナカヨSP              | アンシンSP |
| 弊社記号                   | STD2                                                              | T2     | STD3 | 6P     | C4                                                                                     | C4Z     | C5      | C6F                | C6W                              | C6E                              | T2                    | T2C      | NSP                | ASP    |
| ソケット<br>形 状            |                                                                   |        |      |        |                                                                                        |         |         |                    |                                  |                                  |                       |          |                    |        |
| ナースコール<br>スイッチ<br>形 状  |                                                                   |        |      |        |                                                                                        |         |         |                    |                                  |                                  |                       |          |                    |        |
| ナースコール<br>子機型番<br>(一例) | RB-822<br>RB-822A<br>RB-822C<br>RB-822A-C<br>NBR-8A/A<br>NBR-8A-C |        |      |        | ※⑧⑨は型番を確認してください。<br>BA-511 BA-511A BA-501 BA-501A<br>BA-511Z BA-511ZA BA-501Z BA-501ZA |         | RB-830Z | BA-502Z<br>BA-501Z | BA-601WZ<br>BA-602WZ<br>RB-826WZ | BA-701EX<br>BA-712EX<br>RB-826EX | VHR-560C<br>BVH-R560C |          | ※㉔㉔はメーカーを確認してください。 |        |

\* ケアコム社製⑱ WZ子機 (旧Wellシリーズ)

㉔EX子機の場合は、別途ケアコム社製「分配コンセント」が必要です。

⑱に該当する場合

- 名称: 分配コンセント (2P、W6P、一般)  
型式: BB-301WZ-2P/W6P-NC
- 名称: 分配コンセント (2P、W6P、特定1)  
型式: BB-301WZ-2P/W6P-OP1



㉔に該当する場合

- 名称: 分配コンセント (2P)  
型式: BB-301EX-2P



| メーカー                   | アイホン (株)       |                                                                      |         |         |                  |                 |                 |                                                                                |          |        | ジーコム                       |        |
|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------|--------|
| 番 号                    | ⑤              | ⑥-B                                                                  | ⑥-C     | ⑥-E     | ⑦                | ⑪               | ⑫               | ⑬                                                                              | ⑭        | * ⑰    | ㉒                          | ㉓      |
| 名 称                    | アイホン2P         | アイホン4PB                                                              | アイホン4PC | アイホン4PE | アイホン5P           | アイホン5PNF        | アイホン6PNF        | アイホン3P                                                                         | アイホン3PNF | アイホン6V | ジーコムRC                     | ジーコム2P |
| 弊社記号                   | A2             | A4-NB                                                                | A4-NC   | A4-NE   | A5               | A5NF            | A6NF            | A3                                                                             | A3NF     | A6V    | GRC                        | G2     |
| ソケット<br>形 状            |                |                                                                      |         |         |                  |                 |                 |                                                                                |          |        |                            |        |
| ナースコール<br>スイッチ<br>形 状  |                |                                                                      |         |         |                  |                 |                 |                                                                                |          |        |                            |        |
| ナースコール<br>子機型番<br>(一例) | UAR-8<br>UBR-8 | ※⑥-B、C、Eは型番を確認してください。<br>⑥-Bは一部対応できない場合があります。<br>NB-RC/A NC-RC NE-RC |         |         | UA-SB8<br>UB-SB8 | NFR-8A<br>NFR-8 | NF-SBA<br>NF-SB | ⑬⑭は、AとBの2種類がありますので、確認が必要です。<br>下記の方法でご確認ください。<br>A: 廊下灯で復旧<br>B: ステーション・廊下灯で復旧 |          |        | NL-SB<br>NLR-8<br>NLR-8-TT | DT50SW |

\* ⑰アイホン社製「Vi-nurse」シリーズの場合は、壁に「オプション入力コンセント」があるかをご確認ください。無い場合、別途「オプション入力コード」が必要です。



オプション入力コンセント



- 名称: オプション入力コード  
型式: NLR-CA-OPA