



ACアダプタに関する注意点



差し込み口が合えば、他社製のACアダプタを流用できるのでしょうか？


院内で、色々な機械が増えるにつれACアダプタも増えます・・

他社製ACアダプタを弊社製品に流用する（またその逆）は絶対にしないでください！



他社の AC アダプタは絶対に使わない！

弊社専用アダプタは、製品を安全にご使用いただくための試験をクリアしたものです。プラグ形状やスペックが同じだからと他社製のACアダプタを使用すると正常動作しません。また、製品が故障する可能性がありますのでご注意ください。

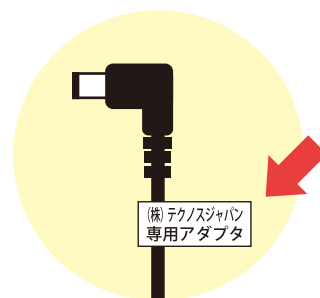


弊社製品の AC アダプタは
専用ラベルが目印です！

設置・使用時の注意点


- ☐ アダプタを奥まで差し込む事




- ケーブルは結んだり、束ねた状態で使用しない

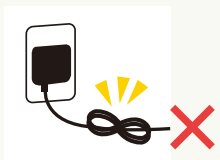

- ケーブルの上を
キャスターで踏まない
(通らない)

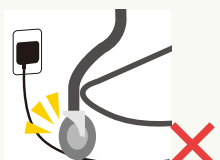

- ☐ テンションをかけない
(ケーブルを引っ張らない)

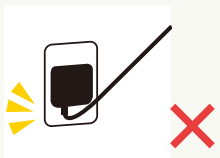

日常の点検


- ☐ ケーブルが裂けていないか




- ☐ ケーブルがねじれていないか



- プラグが変形し、折れたり
破損はしていないか

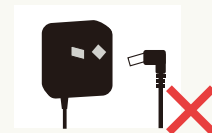

- ☐ ケーブルの折りグセがないか

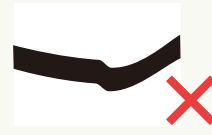

- ☐ アダプタが熱を帯びていないか

