

ナースコール形状の特定方法

ナースコール参照図


ケアコム「分配コンセント」について

**アイホン「オプション入力コード」
について**

ナースコール形状の特定方法


1 ナースコールメーカー を調べる

例) ケアコム、アイホン、ナカヨ、NTTなど

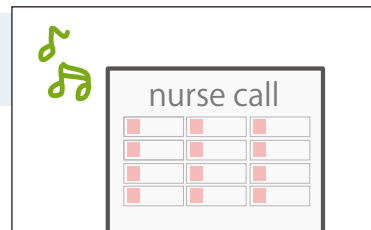

2 ナースコールスイッチを外し、ソケット形状を確認する

実際にご利用いただくお部屋のナースコールスイッチを取り外し、壁側のソケット形状を確認してください。

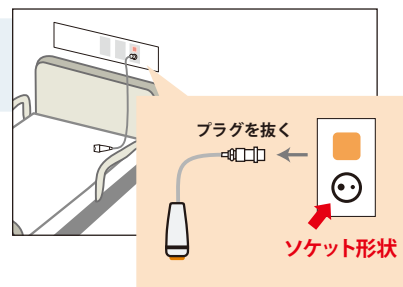


3 ナースコール参照図 から形状を特定する

ソケット形状とナースコール参照図を照らし合わせ、ナースコール形状を特定してください。
ナースコールの子機型番からでもナースコール形状を特定できます。



4 ご注文・デモ機申込時に、弊社記号をお伝えください

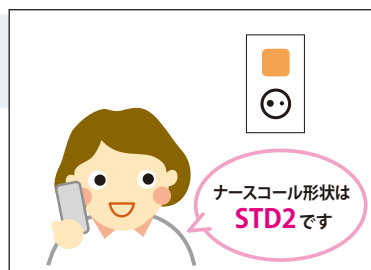


その他の確認方法

**ナースコールの子機型番からでも
ソケット形状を特定できます！**

参照図でご確認ください。

＼ ナースコール子機の型番確認 /

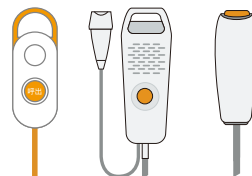


ナースコール参照図は次ページをご覧ください。▶

ナースコール参照図

参照図に該当するナースコールスイッチは加工や改造の必要がありません。

ナースコールシステムが変更になる場合は中継ボックスとともに接続アダプタが必要になる事があります。

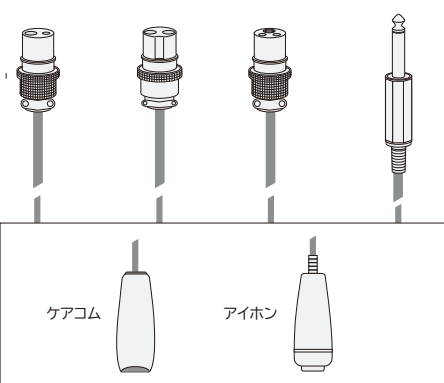メーカー	(株)ケアコム/アイホン(株)				(株)ケアコム					パナソニック	
番号	①	②	③	④	⑧	⑨	⑯	*⑱	*㉔	②	⑩
名称	標準2P	トーコン2P	標準3P	6mmプラグ	ケアコム4P	ケアコム4PZ	ケアコム6PF	ケアコム6PW	ケアコム6PE	トーコン2P	パナソニック2P
弊社記号	STD2	T2	STD3	6P	C4	C4Z	C6F	C6W	C6E	T2	T2C
ソケット形状											
ナースコールスイッチ形状											
ナースコール子機型番(一例)	RB-822 RB-822A RB-822C RB-822A-C NBR-8A/A NBR-8A-C				※⑧⑨は型番を確認してください。 BA-511 BA-511A BA-501 BA-501A			BA-502Z BA-501Z	BA-601WZ BA-602WZ RB-826WZ	BA-701EX BA-712EX RB-826EX	VHR-560C BVH-R560C

*ケアコム社製⑱ WZ子機(旧Welシリーズ)
②EX子機の場合は、別途ケアコム社製
「分配コンセント」が必要です。

⑱に該当する場合




- 名称: 分配コンセント(2P、W6P、一般)
型式: BB-301WZ-2P/W6P-NC
- 名称: 分配コンセント(2P、W6P、特定1)
型式: BB-301WZ-2P/W6P-OP1



㉔に該当する場合

- 名称: 分配コンセント(2P)
型式: BB-301EX-2P

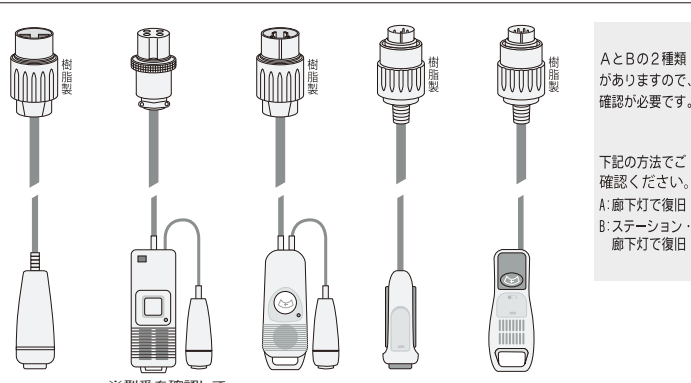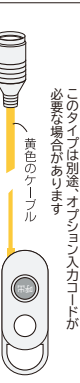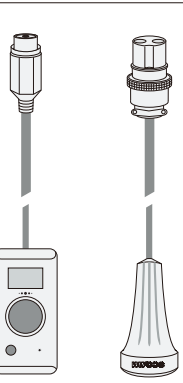

メーカー	アイホン(株)							ナカヨ	NTT	ジーコム	
番号	⑤	⑥-B	⑦	⑪	⑫	⑭	*⑲	⑳	㉑	㉒	㉓
名称	アイホン2P	アイホン4PB	アイホン5P	アイホン5PNF	アイホン6PNF	アイホン3PNF	アイホン6V	ナカヨSP	アンシンSP	ジーコムRC	ジーコム2P
弊社記号	A2	A4-NB	A5	A5NF	A6NF	A3NF	A6V	NSP	ASP	GRC	G2
ソケット形状											
ナースコールスイッチ形状											
ナースコール子機型番(一例)	UAR-8 UBR-8	※型番を確認してください。 一部対応できない場合があります。 NB-RC/A	UA-SB8 UB-SB8	NFR-8A NFR-8	NF-SBA NF-SB	NL-SB NLR-8 NLR-8-TT		※㉑㉒はメーカーを確認してください。		DT50SW	

*⑲アイホン社製「Vi-nurse」シリーズの場合は、
壁に「オプション入力コンセント」があるかをご確認ください。
無い場合、別途「オプション入力コード」が必要です。



オプション入力コンセントがない場合のみ必要

- 名称: オプション入力コード
型式: NLR-CA-OPA



ケアコム「分配コンセント」について

ナースコール参照図の⑬C6W、⑭C6Eに該当すると分配コンセントが必要です。
必要な部材や、接続方法は下記の通りです。

ケアコム（⑬C6W）に該当する場合



ケアコムWELLシリーズ

分配コンセント（2P、W6P）

下記どちらかの分配コンセントが必要です。

名称	型式	識別
分配コンセント（2P、W6P、一般）	BB-301WZ-2P/W6P-NC	識別不可
分配コンセント（2P、W6P、特定1）	BB-301WZ-2P/W6P-OP1	識別可 （設定必要）

ケアコム（⑭C6E）に該当する場合





ケアコムEXシリーズ

分配コンセント（2P）

名称	型式	識別
分配コンセント（2P）	BB-301EX-2P	識別不可

接続イメージ

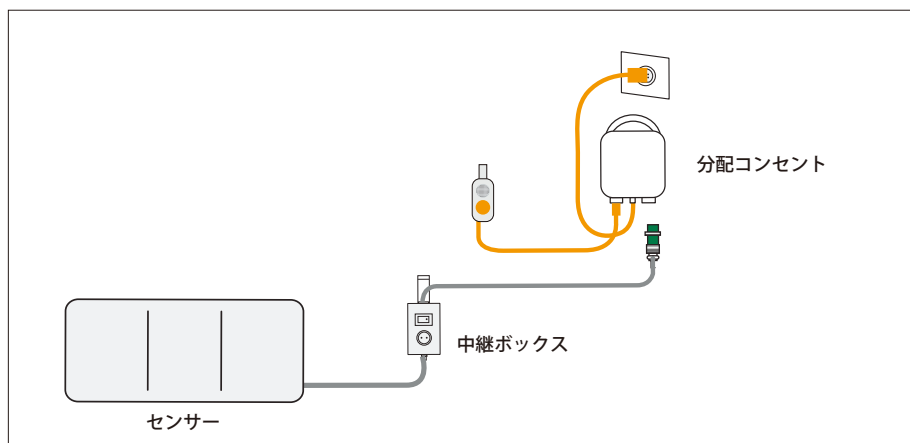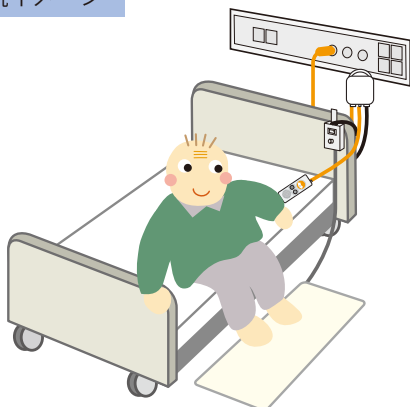

※ケーブルタイプの場合（コードレスタイプも可）

アイホン「オプション入力コード」について

ナースコール参照図の⑬A6Vに該当する場合、オプション入力コードが必要な場合があります。

アイホン（⑬A6V）に該当する場合


オプション入力コードが必要かどうかは、
下記の流れでご確認ください。



オプション入力コード

型式：NLR-CA-OPA

お部屋にオプション入力コンセントがあるかを確認してください。

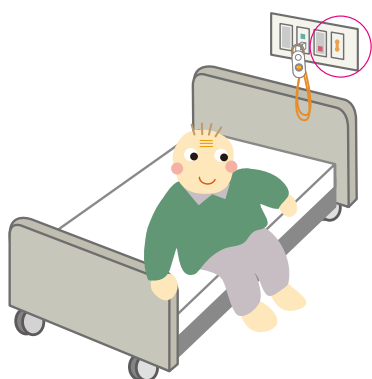

オプション入力コンセント

センサーを接続する専用のコンセントです。

オプション入力コンセントが「ある」

オプション入力コンセントが「ない」




オプション入力コードが
「不要」




オプション入力コードが
「必要」

接続イメージ

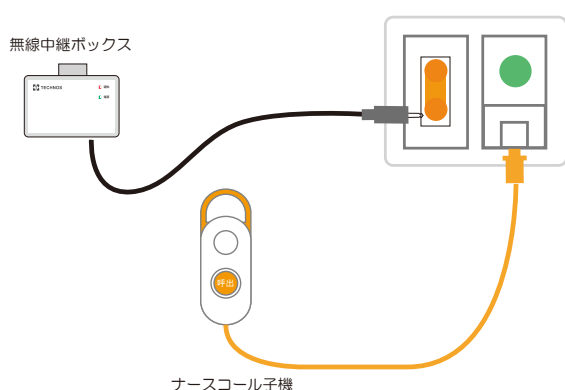

接続イメージ

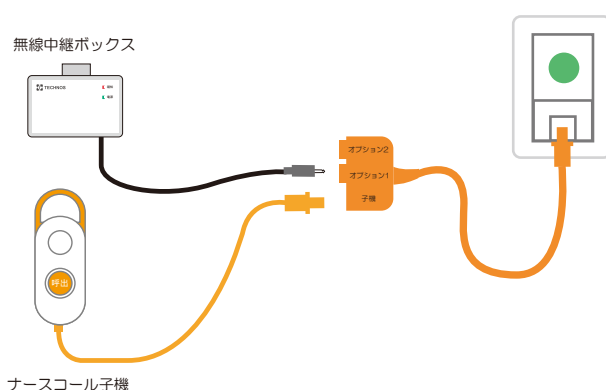

※コードレスの場合（ケーブルタイプも可）