



# ナースコールの形状に関する豆知識

**Q** ナースコールの差込口には、いろんなタイプがあるようですが  
当院のナースコールはどのタイプかを調べる方法を教えてください。



**A** 下記を参考にして差込口を特定してください。

①ナースコールメーカーを調べてください。

ケアコム	ナカヨ
アイホン	NTT
パナソニック	その他



②ナースコールスイッチを抜いて壁側のソケット形状を確認してください。

次頁のナースコール参照図と照らし合わせてご確認ください。



この部分

例：ナースコールの壁側ジャック部分  
(ケアコム様 HP より画像抜粋)



③該当する形状番号を製品のご注文時やデモ機のお申込時にお伝えください。

- ※1 上記の流れが難しい場合は、壁から抜いたナースコールスイッチのプラグの形状でご確認ください。  
それでも判別できない場合は、ナースコールスイッチの型番をご確認ください。
- ※2 ナースコール参照図⑩は「分配コンセント」が必要です。  
また、⑩はオプション入力コンセントの有無を確認し、無い場合は別途「オプション入力コード」が  
必要です。(ナースコール参照図参照)
- ※3 ナースコール参照図に掲載されていない形状は特注となります。

# ナースコール参照図

参照図に該当するナースコールスイッチは加工や改造の必要がありません。

\*下図以外のナースコールスイッチは弊社にお送り頂き、簡単な加工を行い、製品と共にお届けさせていただきます。

\*ナースコールシステムが変更になる場合は中継ボックスとともに接続アダプタが必要になる事があります。

メーカー名	(株) ケアコム									パナソニック		ナカヨ	NTT
番号	①	②	③	④	⑧	⑨	⑮	⑯	*⑱	⑫	⑩	⑳	㉑
名称	標準2P	トーン2P	標準3P	6mmプラグ	ケアコム4P	ケアコム4PZ	ケアコム5P	ケアコム6PF	ケアコム6PW	トーン2P	パナソニック2P	ナカヨSP	アンシンSP
弊社記号	STD2	T2	STD3	6P	C4	C4Z	C5	C6F	C6W	T2	T2C	NSP	ASP
ソケットの形状													
ナースコールスイッチの形状													
ナースコール子機型番(1例)	RB-822 RB-822C		RB-823 RB-823C		※⑧⑨は型番を確認して下さい。 BA-511 BA-501 BA-511Z BA-501Z			RB-830Z	BA-502Z BA-501Z	RB-826WZ BA-601WZ BA-602WZ	VHR-560C BVH-R560C	※⑳㉑はメーカーを確認して下さい。	

メーカー名	アイホン(株)													
番号	①	②	③	④	⑤	⑥-B	⑥-C	⑥-E	⑦	⑪	⑫	⑬	⑭	*⑰
名称	標準2P	トーン2P	標準3P	6mmプラグ	アイホン2P	アイホン4PB	アイホン4PC	アイホン4PE	アイホン5P	アイホン5PNF	アイホン6PNF	アイホン3P	アイホン3PNF	アイホン6V
弊社記号	STD2	T2	STD3	6P	A2	A4-NB	A4-NC	A4-NE	A5	A5NF	A6NF	A3	A3NF	A6V
ソケットの形状														
ナースコールスイッチの形状														
ナースコール子機型番(1例)	NBR-8A/A NBR-8A-C				UAR-8 UBR-8	※⑥-B,C,Eは型番を確認して下さい。 ⑥-Bは一部対応できない場合があります。 NB-RC/A NC-RC NE-RC			UA-SB8 UB-SB8	NFR-8A NFR-8	NF-SBA NF-SB			NL-SB NLR-8 NLR-8-TT

\*⑱ケアコム社製「Well」シリーズの場合は、別途ケアコム社製「分配コンセント」が必要です。



ケアコム社製分配コンセント機種例  
名称:分配コンセント(2P、W6P、一般)  
型式:BB-301WZ-2P/W6P-NC  
定価:¥16,000(税別)

\*⑰アイホン社製「Vi-nurse」シリーズの場合は、壁に「オプション入力コンセント」の有無をご確認ください。無い場合、別途「オプション入力コード」が必要です。



オプション入力コンセント



名称:オプション入力コード  
型式:NLR-CA-OPA  
定価:¥8,500(税別)